

기관절개 환자의 간호 개선



기관절개 환자와 간병인은 컴프레서 및 찬물의 분무기에서 발생하는 소음과 적절히 유지되지 못하는 가습을 더 이상 참고 버틸 필요 없이 되었습니다.



Optiflow™+ 기관절개 인터페이스

- 환자 인터페이스에 유동 응축액 형성을 감소시켜주는 Evaqua™ 기술
- 직접 연결형 및 기관절개 칼라(collar) 인터페이스 옵션

산소 보충(필요 시)

- FiO₂ 21% - 100%
- 초음파 산소 분석기가 내장되어 있어 별도의 교정, 서비스 또는 교체 과정이 필요 없음

유량 설정 조정 가능

- 통합 유량 생성기가 넓은 유량 범위(10-60 L/min)를 소음없이 전달합니다. 컴프레서 또는 벽걸이형 공기 공급 장치 필요 없음

설정, 사용 및 청소가 간편하도록 설계됨

- 설정 및 문제 해결에 유용한 애니메이션이 화면에 표시됨

가온 호흡 튜브(AirSpiral™)

- 나선형의 이중 열선과 고유한 통합 온도 센서 장착


통합 온도 센서

- 외부 프로브, 케이블 또는 어댑터가 필요 없음

수증기 vs. 물방울

F&P myAIRVO™ 2 가습기는 수증기를 생성하고자 고안되었습니다(분자)

- 분무기 및 기타 에어로졸 전달 시스템은 물방울을 생성하고자 고안되었습니다. 수증기와는 달리, 물방울은 커서 병원균 전달이 용이합니다.¹

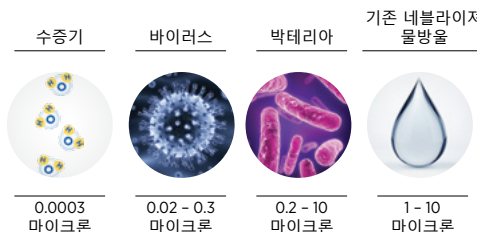

제품 코드	
PT100xx	myAIRVO 2 가습기
900PT560	AirSpiral™ 가온 호흡 튜브(10팩)
900PT560E	AirSpiral™ 가온 호흡 튜브(1팩)
OPT970	Optiflow™+ 기관절개 인터페이스(20팩)
OPT970E	Optiflow™+ 기관절개 인터페이스(1팩)
OPT971	객담 방지용 여분(20팩)
OPT980	마스크 인터페이스 어댑터(20팩)
OPT980E	마스크 인터페이스 어댑터(1팩)

1. Takigawa K, Fujita J, Negayama k, Yamagishi Y, Yamaji Y, Ouchi K. Nosocomial Outbreak of Pseudomonas cepacia Respiratory Infection in Immunocompromised Patients Associated with Contaminated Nebulizer Devices. Jpn J Infect Dis. 1993; 67(11):1115-1125.

더 자세한 사항은 www.fphcare.com/myairvo를 방문하십시오