

Sélection.
Taille.
Aide.



F&P myMask

F&P myMask permet d'identifier facilement le masque F&P adapté à votre patient. La version mise à jour permet désormais à tous les patients et professionnels de la santé de sélectionner le masque et de déterminer sa taille directement dans l'application.

Téléchargement

Téléchargez myMask à l'aide du code QR ci-dessous pour commencer.

Balayez pour
télécharger



Sélection

Les patients répondent à une série de questions simples, puis choisissent parmi les masques recommandés en fonction de leurs besoins liés à leur mode de vie et de leurs habitudes de sommeil.

Outil de sélection du masque



Taille

Le patient numérise son visage en temps réel à l'aide de sa caméra. F&P myMask détermine avec précision* la taille du masque de PPC de Fisher & Paykel Healthcare.

Balayage en cours



Aide

Des vidéos explicatives montrent aux patients comment mettre en place, ajuster et nettoyer leur masque. Une assistance technique est également disponible, au besoin.

Mon masque Solo Nasal




Modes alternatifs pour F&P myMask

Ces modes guidés par les cliniciens facilitent la sélection du masque et la détermination de sa taille

Pour vous inscrire à ces services, communiquez avec votre représentant de Fisher & Paykel Healthcare.

Mode clinicien

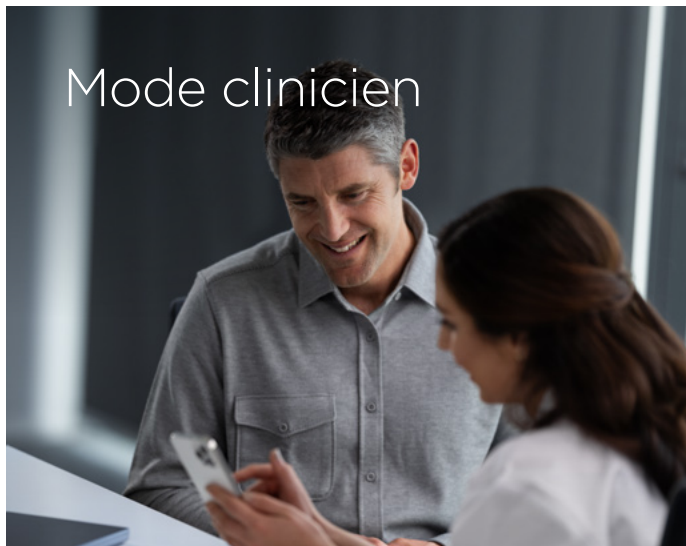

Le Mode Clinicien (en personne) permet au clinicien de sélectionner le masque et d'en déterminer la taille sur son téléphone

- Consulter les recommandations de sélection et de taille pour plusieurs masques F&P, permettant au clinicien de choisir le masque le mieux adapté au patient.
- Obtenir des informations sur la taille grâce à des graphiques d'analyse, qui fournissent des renseignements supplémentaires pour les patients situés entre deux tailles.
- La réinitialisation des recommandations de masque permet une utilisation de l'application auprès de plusieurs patients, tout en garantissant leur confidentialité.

Mode patient



Le Mode Patient (à distance) permet aux cliniciens de gérer à distance le processus de sélection du masque et de détermination de sa taille

- Propulsé par F&P Services, un tableau de bord permet de gérer les patients et d'envoyer des messages texte afin de suivre leur progression dans la sélection du masque et la détermination de sa taille.
- Le masque et la taille sélectionnés s'affichent automatiquement dans le tableau de bord F&P Services.
- Les autres masques et tailles sont également enregistrés dans le tableau de bord F&P Services, ce qui permet au clinicien de proposer une autre option si le patient souhaite essayer un second masque.

* La précision de l'application F&P myMask pour la détermination de la taille a été validée auprès de 73 participants en 2023. Par rapport à l'utilisation de compas, les résultats obtenus avec l'application F&P myMask avaient une précision médiane de plus de 91 % (intervalle de confiance de 90 à 95 %) et étaient fondés sur trois mesures : hauteur du visage, hauteur du nez et largeur du nez. † Nous prenons au sérieux la protection des données, des renseignements personnels et de l'anonymat du patient. Il n'est pas nécessaire pour le patient de créer un compte pour utiliser les fonctionnalités de l'application myMask, y compris l'accès aux outils de sélection du masque et de la taille ainsi qu'à l'aide et au soutien. Aucune image du patient n'est transmise pendant la sélection du masque et de la taille avec myMask et aucune image ou vidéo n'est conservée sur le dispositif après l'exécution de ces tâches. Aux fins de gestion de la sécurité des données, nous avons obtenu la certification ISO 27001 à portée internationale et la certification ISO 13485 pour la Nouvelle-Zélande. Pour obtenir la description complète du produit et la liste des mises en garde, des risques et des avertissements, consultez les instructions d'utilisation fournies avec le produit. Utiliser le dispositif de la façon prévue. Toujours suivre les instructions d'utilisation. F&P, myMask, F&P Solo et Solo sont des marques de commerce de Fisher & Paykel Healthcare Limited. PM-637177 REV A © 2026 Fisher & Paykel Healthcare Limited