

F&P my820 System

Preguntas frecuentes



¿Para qué grupos de pacientes resulta útil el F&P my820 System?

El F&P my820 System está destinado a pacientes adultos y pediátricos (>5 kg) en centros de atención a largo plazo y de atención domiciliaria.

¿Qué tipos de terapia permite aplicar el F&P my820 System?

El F&P my820 System permite administrar ventilación invasiva, ventilación no invasiva (NIV) y terapias de alto flujo humidificado.



**Ventilación
invasiva**

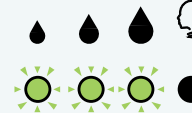
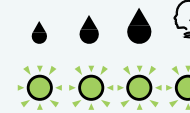


**Ventilación no
invasiva**



**Alto flujo
humidificado**

¿Cuáles son los parámetros de rendimiento de los cuatro ajustes del F&P my820 System?

	 1 2 3 4	 1 2 3 4	 1 2 3 4	 1 2 3 4		
Intervalo de temperatura en el extremo del paciente	Consulte las instrucciones para el usuario del tubo respiratorio					
Producción de humedad* (incluida una incertidumbre de medición de la humedad de 1 mg/L)	≥12 mg/L		≥16 mg/L		≥33 mg/L	
Intervalo de caudal (BTPS)	5-70 L/min			5-40 L/min		
	No invasiva			Invasiva		
	Alto flujo humidificado					

*Producción de humedad (salvo en caso de que salte una alarma del humidificador o de que se produzcan un fallo eléctrico o una perturbación electromagnética)

¿Cómo sabré que el F&P my820 System está listo para usar?

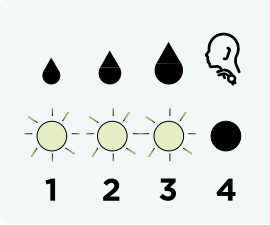
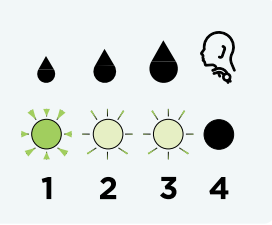
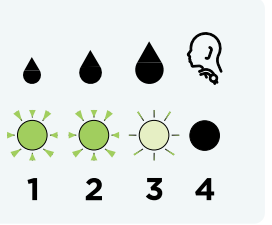
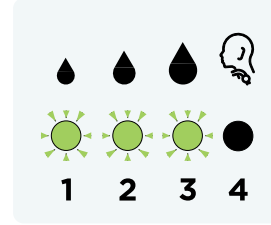
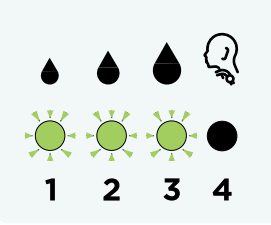
El sistema necesita un tiempo para alcanzar el ajuste de humedad seleccionado.

A este tiempo lo llamamos «tiempo de calentamiento». Los indicadores de configuración de la base del humidificador mostrarán una animación que se desvanece a medida que el dispositivo se calienta. Los indicadores de configuración se encenderán de forma permanente conforme el F&P my820 System alcanza los objetivos de humedad (temperatura) de cada configuración.

El tiempo de calentamiento del F&P my820 System es de menos de 60 minutos.

En la siguiente tabla se muestra lo que el indicador de configuración del humidificador mostrará durante el tiempo de calentamiento.

Configuración 3

Animación de calentamiento	Calentamiento completo
   	

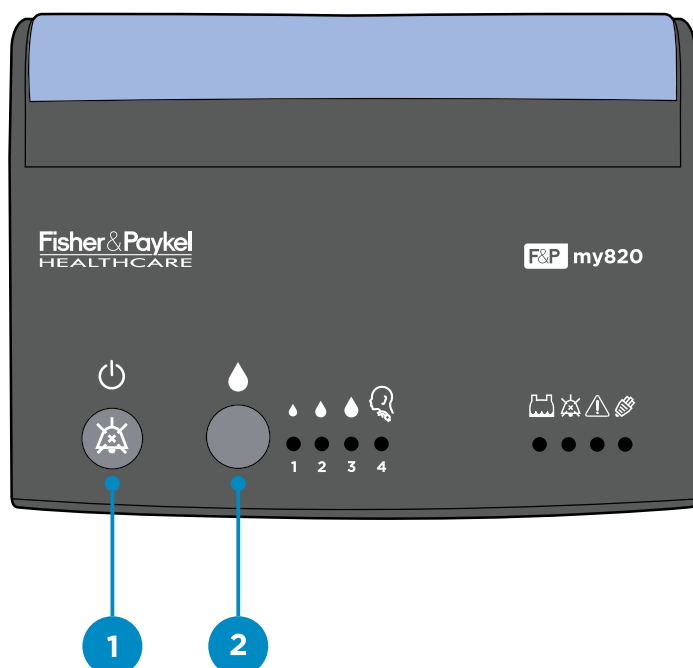
¿Qué función tienen los dos botones del control de la base del humidificador?

1. Botón de espera (encendido/apagado)

Una pulsación breve (de menos de dos segundos) enciende la base del humidificador. Cuando se está usando, una pulsación breve también pausará una alarma acústica. Una pulsación prolongada (de más de dos segundos) apagará la base del humidificador.

2. Botón de configuración

Selecciona el ajuste de temperatura (humedad) deseado.



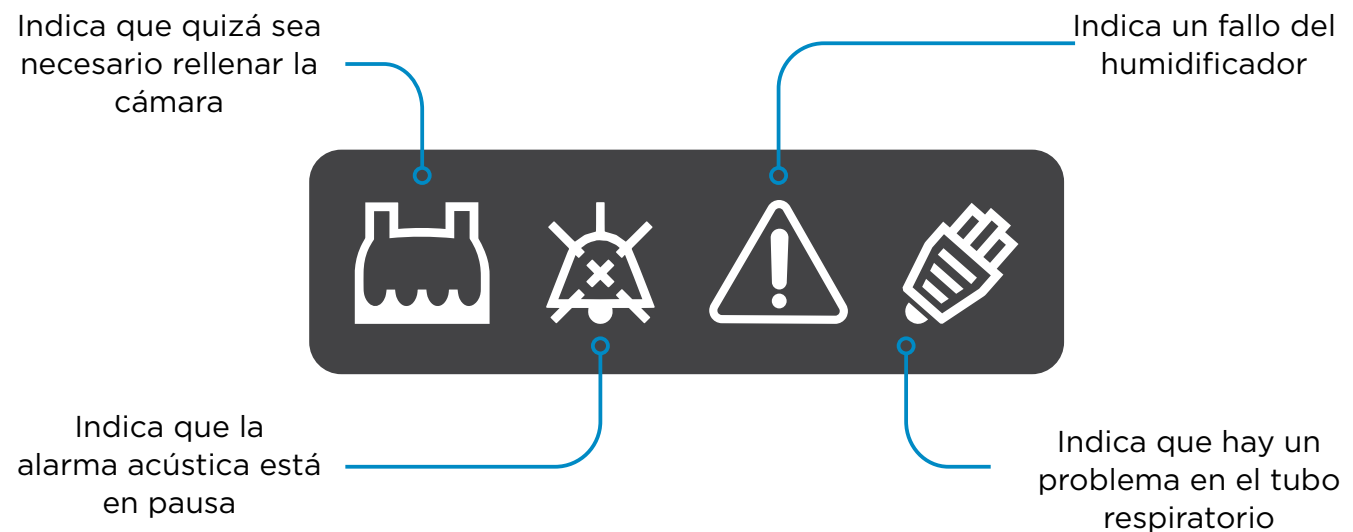
¿Qué señales de alarma tiene el F&P my820 System?

El F&P my820 System tiene dos tipos de alarma con los que informar al usuario de posibles interrupciones de la terapia:

1. **Prioridad baja (solo visual)**
Se muestra una luz amarilla fija bajo el símbolo correspondiente de la base del humidificador
2. **Prioridad media (visual con audio)**
Se indica mediante tres pitidos que se repiten cada cinco segundos, junto con una luz amarilla parpadeante bajo el símbolo correspondiente de la base del humidificador

Para obtener más información sobre los detalles concretos de cada parámetro de alarma, consulte las instrucciones para el usuario.

¿Qué representan los cuatro símbolos de alarma de la base del humidificador F&P my820?



Las instrucciones para el usuario del F&P my820 incluyen una lista completa de las descripciones de las alarmas y sus resoluciones.

¿Qué diferencias hay entre el MR810 y el F&P my820?

El F&P my820 System ofrece un rendimiento de la humedad optimizado en comparación con el MR810, lo que le permite prestar asistencia a los pacientes que reciben ventilación invasiva en entornos domiciliarios.

También se ha mejorado el sistema de alarma, para que sirva de apoyo al rango de terapia ampliado del F&P my820 System.

	MR810	F&P my820
Tipos de terapia admitidos		
Ventilación invasiva	✗*	✓
Ventilación no invasiva	✓	✓
Terapia de alto flujo humidificado	✓	✓
Sistema de alarma visual	✓ (Limitado)	✓
Sistema de alarma acústica	✗	✓
Adaptador del cable calefactor integrado	✓	✓
No hay sondas ni adaptadores independientes	✓	✓

*Se puede usar en ciertas aplicaciones

Si desea acceder a especificaciones concretas de uno de los dispositivos, consulte las instrucciones para el usuario de cada producto.

¿Cuáles son las dimensiones y el peso de la base del humidificador F&P my820 en comparación con la base del humidificador MR810?

La base del humidificador de los modelos MR810 y F&P my820 tienen las mismas dimensiones de profundidad y ancho. El F&P my820 cuenta con patas que ofrecen protección adicional contra la entrada de agua. Esto hace que sea 4 mm más alto que el MR810. Consulte a continuación las dimensiones del dispositivo.



¿Cómo debo limpiar la base del humidificador F&P my820?

Si es necesario, limpie la base del humidificador con un paño limpio no abrasivo para eliminar las cantidades significativas de suciedad.

Limpie y desinfecte la base del humidificador únicamente conforme a las instrucciones para el usuario. Si no se respetan estas instrucciones, podría perjudicarse el funcionamiento y provocarse lesiones graves.

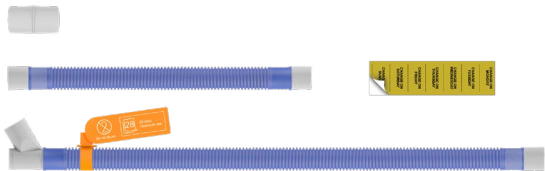
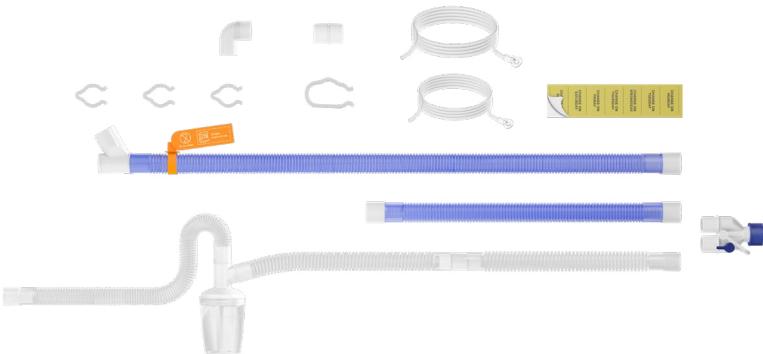
Consulte las instrucciones para el usuario; en ellas se describe el procedimiento de limpieza al completo.

¿El F&P my820 utiliza el mismo soporte de montaje que el MR810?

Sí. El F&P my820 usa el mismo acople de soporte que el MR810 y se puede montar en los mismos soportes que el MR810.

¿Qué cámaras y tubos respiratorios debo usar con el F&P my820 System?

En la siguiente tabla se muestran los consumibles diseñados concretamente para el F&P my820 System.

Código de producto	Descripción	Componentes
820A10*	Circuito calentado F&P 820 de vía única 22 mm	
820A21*	Circuito calentado F&P 820 de vía doble 22 mm	
MR325	Cámara F&P 820 de llenado manual 500 mL	

(No todos los productos están disponibles en todos los mercados)

* Para pacientes adultos y pediátricos (>5 kg)

¿Qué diferencia hay entre los tubos respiratorios F&P my820 y los circuitos respiratorios de la serie F&P RT?

A diferencia de los circuitos de la serie F&P RT, el F&P my820 System no usa sondas de temperatura externas y, por tanto, no tiene ningún puerto de sonda en el tubo respiratorio.

Para obtener más información, póngase en contacto
con el representante local de Fisher & Paykel Healthcare.



F&P es una marca comercial de Fisher & Paykel Healthcare Limited.

638505 REV A © 2026 Fisher & Paykel Healthcare Limited.