

Nota importante: Esta es únicamente una guía de inicio rápido y no sustituye en modo alguno las instrucciones para el usuario del F&P my820 System. Los usuarios deben leer las instrucciones para el usuario de todos los componentes del sistema, lo que incluye la base del humidificador del F&P my820 y sus accesorios, para conocer su uso previsto, sus advertencias y sus precauciones.

Configuración del dispositivo

1

Inserte la cámara de humidificación (A) en la base del humidificador (B). Retire las tapas de los puertos y rellene hasta la línea negra con agua estéril conforme a la USP.

2

Conecte el tubo respiratorio para inspiración (C) a la cámara de humidificación, y la línea seca (D) al ventilador o la fuente de flujo. Conecte el adaptador de cable calefactor (E) al tubo respiratorio para inspiración.

3

Encienda el ventilador o la fuente de flujo; configure para la terapia deseada. Lleve a cabo las comprobaciones pertinentes (si es necesario) según las instrucciones para el usuario. Active el flujo de ventilación.

4

Encienda el humidificador presionando brevemente el botón de espera. Espere a que se oiga un pitido y asegúrese de que las ocho luces indicadoras se iluminen en la base del humidificador. Compruebe que el indicador del cable calefactor (E) se ilumine con una luz verde para confirmar la conexión correcta al tubo respiratorio.

5

Presione el botón de configuración para cambiar la configuración de humedad (temperatura); p. ej., 1-4.

Consumibles disponibles

Código de producto	Descripción	Duración de uso
820A10	Circuito calentado F&P 820 de vía única 22 mm*	Para uso en un solo paciente durante un máximo de 28 días**
820A21	Circuito calentado F&P 820 de vía doble 22 mm*	Para uso en un solo paciente durante un máximo de 28 días**
MR325	Cámara F&P 820 de llenado manual 500 mL	Para uso en un solo paciente durante un máximo de 28 días**

(No todos los productos están disponibles en todos los mercados)
*Para pacientes adultos y pediátricos (> 5 kg).
**No limpie los tubos respiratorios ni las cámaras, ya que no están destinados para su limpieza.

Parámetros y configuración del funcionamiento del humidificador

El F&P my820 System tiene cuatro configuraciones de humedad (temperatura) diferentes. Esta tabla muestra los parámetros de funcionamiento de cada configuración del humidificador, así como una indicación sobre las terapias que deben administrarse en cada configuración.

	 1 2 3 4	 1 2 3 4	 1 2 3 4	 1 2 3 4
Intervalo de temperatura en el extremo del paciente	Consulte las instrucciones para el usuario del tubo respiratorio			
Producción de humedad* (incluida una incertidumbre de medición de la humedad de 1 mg/L)	≥ 12 mg/L		≥ 16 mg/L	≥ 33 mg/L
Intervalo de caudal (BTPS)	5-70 L/min			5-40 L/min
Tipo de terapia	No invasiva			Invasiva
	Alto flujo humidificado			

*Producción de humedad (salvo en caso de que salte una alarma del humidificador o de que se produzcan un fallo eléctrico o una perturbación electromagnética)

Indicadores de alarma

**Compruebe el agua:** Indica que es posible que sea necesario rellenar la cámara

**Alarma acústica en pausa:** Indica que la alarma acústica está en pausa

**Precaución:** Indica un fallo del humidificador

**Compruebe el cable calefactor:** Indica que hay un problema en el tubo respiratorio

Para obtener una lista completa de descripciones de las alarmas y sus resoluciones, consulte las instrucciones para el usuario del my820 System.

Señales de la alarma

El F&P my820 System tiene dos tipos de señales de alarma que alertan a los usuarios de posibles alteraciones de la terapia.



Prioridad baja (solamente visuales)
Una luz amarilla continua



Prioridad media (visuales con sonido)
Tres pitidos repetitivos con una luz amarilla intermitente