

F&P myMask



Selezione.
Misura.
Assistenza.

App per maschera OSA

www.fphcare.com

Fisher & Paykel
HEALTHCARE

F&P myMask

F&P myMask facilita la ricerca della maschera F&P giusta per il tuo paziente. L'app aggiornata ora offre **capacità di selezione e scelta della misura della maschera, nonché le schede di contatto insieme al materiale formativo esistente e alla guida.**

Ora puoi facilmente selezionare, scegliere la misura e assistere i tuoi pazienti di persona. Questi strumenti proattivi possono aiutarti ad assistere la capacità del paziente e la compliance della maschera.

Gli strumenti di selezione e scelta della misura sono servizi esclusivamente su invito. Per registrarti o per ulteriori informazioni, rivolgiti al tuo rappresentante Fisher & Paykel Healthcare.

Selezione

Esistono così tante maschere tra cui scegliere! Come fai a decidere?

I pazienti rispondono a una serie di semplici domande. L'app myMask ti offre poi le raccomandazioni per la maschera in base alle informazioni sulle esigenze dello stile di vita del paziente e su come dorme il paziente.

Strumento di selezione maschera



Misura

Tu o il tuo team avete delle difficoltà a scegliere la misura corretta?

Scansiona il viso del paziente in tempo reale. F&P myMask sceglie con precisione la misura delle maschere per PAP Fisher & Paykel Healthcare*, di persona al telefono. Non ti preoccupare, saranno condivisi solo il tipo di maschera del paziente e la relativa misura.†

Scansione in corso



Ulteriore analisi di selezione della misura a portata di mano.



Condividi il codice QR univoco per trasferire il tipo di maschera, la misura e la tua scheda di contatto al paziente.

Assistenza

Le richieste di intervento rappresentano un problema ripetitivo e costoso per la tua organizzazione?

Grazie ai video dettagliati che seguono passo dopo passo, myMask fornisce ai tuoi pazienti l'opzione migliore per un risultato ottimale. Ai pazienti viene mostrato come indossare, mettere a punto e pulire la maschera in maniera efficace. Per comodità è disponibile anche un'assistenza per la risoluzione dei problemi.

La mia maschera nasale Solo



Il paziente scansiona il codice QR per l'assistenza con la maschera e accede alla tua scheda di contatto.

Presentazione di F&P Services

Questo portale web facile da usare ti consente di accedere ai nostri strumenti di selezione e scelta della misura.



La tua scheda di contatto personale

Personalizza i tuoi dettagli di contatto da condividere con i tuoi pazienti.



Gestione dei pazienti

Invita i pazienti a selezionare e scegliere la misura della loro maschera in modalità Medico, poi condividi il materiale formativo sulla maschera e la guida quando hanno bisogno.

Per registrarti per questi servizi, contatta il tuo rappresentante Fisher & Paykel Healthcare di riferimento.



Modalità Medico di persona



Invito del medico a scaricare la F&P myMask App



Selezione della maschera



Raccomandazioni sulla misura



Condivisione dell'app/contatti

* La precisione di selezione della misura della F&P myMask App è stata testata su 73 partecipanti nel 2023. Rispetto all'utilizzo dei calibri, è stato riscontrato che la F&P myMask App aveva un'accuratezza mediana >91% (intervallo di confidenza 90-95%) in tre misure: altezza del viso, altezza del naso e larghezza del naso. * Consideriamo seriamente i dati dei pazienti e la privacy e rispettiamo l'anonimato. Il paziente non deve assolutamente creare un account per utilizzare le funzioni della myMask App compreso l'accesso alla selezione e alla scelta della misura o per la guida e l'assistenza per la maschera. Durante il processo di selezione e scelta della misura di myMask non viene trasmessa alcuna immagine dei pazienti e non viene conservata alcuna immagine o video sul dispositivo dopo il processo. Per gestire la sicurezza dei dati, siamo certificati ISO 27001 a livello internazionale e ISO 13485 in Nuova Zelanda. Per una descrizione completa dell'installazione del prodotto, le precauzioni, i pericoli e le avvertenze, fare riferimento alle istruzioni per l'utente fornite insieme al prodotto. Usare il dispositivo come indicato. Seguire sempre le istruzioni per l'uso, ad es. le istruzioni per l'utente. F&P, myMask, F&P Solo e Solo sono marchi di fabbrica di Fisher & Paykel Healthcare Limited. 634372 REV A © 2025 Fisher & Paykel Healthcare Limited