

NIV用フルフェイスマスク



院内のNIV療法用フルフェイスマスク F&P Nivairo™

F&P Nivairoのインテリジェントシールは2つの高度なマスクフィット機能により成り立っています。RollFit™（ロールフィット）はそれぞれの患者さんの輪郭に合わせてフィットし、TubeFit™（チューブフィット）は胃管周辺のリークを最小限にするように設計されています。

F&P NivairoのErgofit™（エルゴフィット）ヘッドギアは、「患者さんに優しいケア」を提供すべく、通気性の良い素材を使用し、患者さんによって異なる頭部形状に配慮したデザインを採用しています。

Intelligent Seal
Sensitive Care™



特長と利点

Intelligent Seal / インテリジェントシール

ロールフィットによる革新的なシール構造は鼻梁にかかる圧力を最小限に、チューブフィットゾーンは胃管周辺からのリークを最小限に抑えます。全体的なシール性能が改善され、NIV療法をより効果的に提供できます。



Sensitive Care/ 優しいケア

ソフトなシリコン素材のロールフィットシールは、患者さんごとの顔の形状に合わせて自動的に調整されます。通気性の良いエルゴフィットヘッドギアは簡単に調整でき、適切なマスクフィットを実現します。より良いフィット感は、患者さんの治療受け入れにつながります。



Intuitive Use / 直感的な使用感

エルゴフィットヘッドギアは簡単に着脱および調整できるよう設計されています。チューブフィットゾーンにより、胃管を使用している患者さん用に追加パッドを用意する必要が低減し、装着のプロセスが容易になります。



F&P Nivairoは2種類ご用意しています：

RT045 - シングルリム回路用の窒息防止バルブ付エルボータイプ

RT046 - デュアルリム回路用のスタンダードエルボータイプ

4種類のサイズ（XS、S、M、L）から患者さんに合った大きさのものをお選びいただけます。

RT046



TubeFit Seal Zone
胃管周りのシールを容易にします。

Dual Swivel Elbow
2方向に自由に回転するデュアルスイベルエルボーにより、回路の取り回しが容易になり、また、患者さんの動きの妨げにならないよう配慮しています。

RT045



Self-adjusting Crown Strap

セルフアジャストタイプのクラウンストラップにより、装着しやすく、治療中のマスク位置を維持し、鼻梁への圧力を軽減します。

RollFit Seal

ロールフィットシールは、鼻梁の形状に合わせて自動的に調整することにより、正確な装着および効果的なシール性を実現するよう設計されています。

Easy Clip

マスクの両側に設けたイージークリップにより、マスクの取り外しと再装着を簡単に行えます。

ErgoFit Headgear

エルゴフィットヘッドギアは、患者さんの快適性向上を目的として、柔らかく通気性のある生地を使用しています。ねじれがないか視認しやすいよう表裏がわかる2色の落ち着いた色を採用しています。調整しやすく、正確な装着を実現します。

Intelligent Seal



まるで患者さんごとに設計されたマスクのように患者さんの輪郭に順応して自動的に調整され、NIV治療中の患者快適性の維持に役立ちます。

柔軟なロールフィットシールにより、長時間装着しても最低限のリークで快適なフィット感が得られます。チューブフィットゾーンは、胃管を使用している患者さんでも優れたシール性を発揮するよう設計されています。

RollFit
自動調整
シーリング

TubeFit
胃管留置時の
リーク防止



Soft

柔らかい
シリコン素材

ErgoFit

通気性の高い
ヘッドギア

Natural

人間工学に基づいた
デザイン

Fisher & Paykel Healthcareは、効果的なNIV療法を達成するには、患者さんの不快感を軽減する事がいかに重要か理解しています。F&P Nivairoはこれを念頭に置き、患者さんのニーズに細かく配慮し設計されています。

マスクの柔らかいシリコン素材と通気性の良いエルゴフィットヘッドギアは快適性を高めるように設計され、人間工学に基づいたデザインは患者さんの顔の解剖学的な違いに配慮しています。これらにより、患者さんのマスク使用感の改善を実現します。

Intuitive Use



マスクのサイズ選択は重要です。それぞれの患者さんに最適なサイズのマスクを選択する際に役立つSizeMe™ ガイドを、F&P Nivairo マスク1つにつき1枚同梱しています。

最適なサイズを選択できたら、患者さんへのF&P Nivairoの着脱および調整は簡単です。セルフアジャストタイプのクラウンストラップ付きのエルゴフィットヘッドギアにより、治療開始時のセットアップが簡単です。また、Velcro® 素材のストラップでマスクの位置を正確に調整できます。

SizeMe
適切なマスク
サイズの選択

Easy
簡単な着脱

Simple
シンプルかつ
正確な調整



F&P Optiflow™ -
NIV療法の合間の
効果的な呼吸療法

Compatible
F&P熱線入り呼吸
回路に適合*

NIV療法を受けている患者さんに快適な加温加湿を提供し、患者さんの快適性と治療忍容性を最適化するには、F&P NivairoマスクはF&P熱線入り呼吸回路*と使用してください。

F&P Optiflowインターフェースは患者さんが回復してきた時に、NIV療法の合間の呼吸療法として提供できます。インターフェースを交互に用いることにより顔との接触箇所が切り替わり、皮膚の損傷を防ぐことができます。F&P OptiflowはNIVを使用しない時間を延長するサポートをできる可能性があります。¹

* F&P Nivairoマスクの併用推奨呼吸回路については、当カタログの「仕様」頁を参照してください。

製品仕様

F&P Nivairo院内のNIV療法用フルフェイスマスク	窒息防止バルブ付エルボータイプ	スタンダードエルボータイプ
F&P Nivairo、XSサイズ	RT045XS	RT046XS
F&P Nivairo、Sサイズ	RT045S	RT046S
F&P Nivairo、Mサイズ	RT045M	RT046M
F&P Nivairo、Lサイズ	RT045L	RT046L
タイプ	呼気ポートなし、窒息防止バルブ付エルボ-	呼気ポートなし、スタンダードエルボ-
作動圧範囲	4~25 cmH ₂ O	4~25 cmH ₂ O
推奨F&P 850™ システム呼吸回路	RT319	RT380またはRT205/RT200
入数	10	10



Intelligent Seal Sensitive Care™

www.fphcare.com/nivairo