






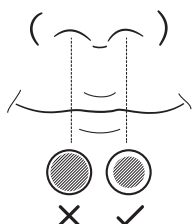

Надевание*

1 Подбор размера канюли

Выберите назальную канюлю соответствующего размера. Вокруг каждой канюли должен быть видимый просвет. Таблицу размеров на следующей странице следует использовать исключительно в качестве рекомендаций.

Вокруг канюль должен быть зазор*



					
XS	S	M	L	XL	XXL
OJR410	OJR412	OJR414	OJR416	OJR418	OJR520

2 Подготовка кожи

Подготовьте кожу пациента, следуя правилам лечебного заведения.

3 Подсоединение к источнику газа

Подсоедините канюлю к источнику газа.

СОВЕТ. Приблизьте руку к назальным канюлям, чтобы проверить выход потока газа из канюль.

4 Удаление первых частей подложки F&P Wigglepad™ 2

Удалите первые части подложек с подушечек Wigglepads 2, не касаясь клеевого слоя.

5 Установка канюли


Введите канюлю в ноздри.

Убедитесь в том, что мост канюли расположен рядом с носом, но не касается носовой перегородки.

ЗАПРЕЩЕНО растягивать канюлю во время применения. Приклейте подушечки Wigglepads 2 к щекам пациента.

6 Фиксация канюли

Удалите вторые части подложек и приклейте подушечки Wigglepads 2 к щекам пациента.

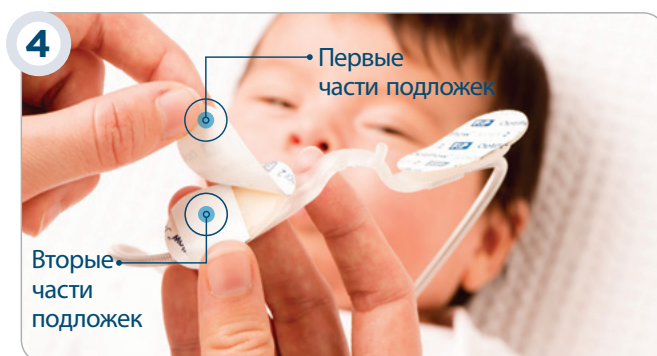

* ВАЖНО! Обязательно обращайтесь к инструкциям пользователя, поставляемым вместе с изделием, где приведены полные указания по настройке, предупреждения, меры предосторожности и противопоказания.

Отсоединение канюли

1 Поместите кончик пальца

Поместите кончик пальца на внешний край подушечки Wigglepads 2 и аккуратно снимите канюлю с подушечки Wigglepads 2.



Удаление и замена подушечек Wigglepads 2

1 Поднимите край подушечки

Поднимите край подушечки Wigglepads 2. При помощи влажной ткани протрите кожу пациента и нижнюю часть подушечки Wigglepads 2, аккуратно отслаивая подушечку от лица пациента.



2 Приклеивание

Прикрепите сменные подушечки Wigglepads 2 к канюле, удалите первые части подложек и приклейте подушечки Wigglepads 2 к щекам пациента.

3 Снятие

Снимите вторые части подложки и приклейте подушечки к щекам пациента.



Информация о размерах

ПРИМЕЧАНИЕ.

Носовые зубцы не должны герметично прилегать к ноздрям. Вокруг каждой канюли должен быть видимый просвет. Вес пациента должен использоваться только в качестве ориентира.

Масса тела (кг)	0,5	1	2	2,5	0,9	1	3,5	4	1	1,5	8	10
Возраст с учетом корреляции*	23 wkGA	29 wkGA	33,5 wkGA	35 wkGA	27 wkGA	28 wkGA	40 wkGA	42,5 wkGA	28 wkGA	31 wkGA	6,6 mo	15,4 mo
Размер интерфейса	OJR410 (XS)				OJR412 (S)				OJR414 (M)			
Масса тела (кг)	3	3,5	18	20	5	7	25	30	8	12,5	30	40
Возраст с учетом корреляции*	37,5 wkGA	40 wkGA	4,9 yr	5,6 yr	47,5 wkGA	4,7 mo	7,6 yr	9,5 yr	6,4 mo	2,2 yr	9,5 yr	12 yr
Размер интерфейса	OJR416 (L)				OJR418 (XL)				OJR520 (XXL)			

wkGA = недели с момента зачатия; mo = месяцы; yr = годы

* Данные о массе тела основаны на валидном исследовании изделий компании F&P.

** Данные о возрасте получены путем корреляции с данными о массе тела на основе сочетания кривых роста Фентона, BO3 и CDC (США).