

El siguiente procedimiento es una sugerencia para la aplicación de la cánula nasal Optiflow™ Junior 2 (OJR410, OJR412, OJR414, OJR416, OJR418).

AJUSTE*

1 Selección del tamaño de la cánula

Seleccione el tamaño adecuado de la cánula; se recomienda una oclusión aproximada del 50 % de las narinas. Como guía se debe utilizar únicamente la tabla de tamaños de la página siguiente.

2 Preparación de la piel

Prepare la piel del paciente de acuerdo con el protocolo del hospital.

3 Conexión a la fuente de oxígeno

Conecte la cánula a la fuente de oxígeno. CONSEJO: Coloque la mano cerca de las puntas de la cánula nasal para asegurarse de que sale flujo de oxígeno a través de ellas.

4 Retirada de las primeras lengüetas de Wigglepads™ 2 de F&P

Retire las primeras lengüetas de refuerzo de las Wigglepads™ 2 de F&P sin tocar el adhesivo.

5 Inserción de la cánula


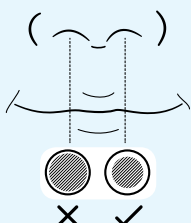




Inserte la cánula en las narinas. Asegúrese de que el puente de la cánula repose cerca de la nariz sin tocar el tabique. NO estire la cánula durante su colocación. Pegue las Wigglepads™ 2 de F&P sobre las mejillas del paciente.

6 Fijación de la cánula

Retire las segundas lengüetas de refuerzo y pegue las Wigglepads™ 2 de F&P sobre las mejillas.

* IMPORTANTE: Consulte siempre las instrucciones del usuario facilitadas con el producto para ver las instrucciones de configuración completas, las advertencias, precauciones y contraindicaciones.

1 SELECCIÓN DEL TAMAÑO DE LA CÁNULA

GAMA DE TAMAÑOS		GARANTICE EL ESPACIO ALREDEDOR DE LAS CÁNULAS NAALES*
XS	 OJR410	
S	 OJR412	
M	 OJR414	
L	 OJR416	
XL	 OJR418	



EXTRACCIÓN DE LA CÁNULA

1 Colocación de la punta del dedo

Coloque la punta del dedo sobre el borde exterior de las Wigglepads™ 2 de F&P y despegue la cánula de las Wigglepads 2 con suavidad.



RETIRADA Y SUSTITUCIÓN DE LAS WIGGLEPADS™ 2 DE F&P

1 Levantamiento del borde

Levante el borde de las Wigglepads™ 2 de F&P. Utilice un paño húmedo para limpiar la piel del paciente y el lado inferior de las Wigglepads 2 mientras las separa de la cara del paciente.



2 Adhesión

Adhiera las Wigglepads™ 2 de F&P de repuesto a la cánula, retire las primeras lengüetas de refuerzo y pegue las Wigglepads 2 sobre las mejillas del paciente.



3 Retirada

Retire las segundas lengüetas de refuerzo y pegue las Wigglepads sobre las mejillas del paciente.

INFORMACIÓN SOBRE TAMAÑOS

		GUÍA DE PESO (KG)								REPUESTOS							
		500g	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4								
	OJR410 XS									F&P Wigglepads™ 2 WJR110							
	OJR412 S																
		GUÍA DE PESO (KG)												REPUESTOS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20	25	30		
	OJR414 M															F&P Wigglepads™ 2 WJR112	
	OJR416 L																
	OJR418 XL																
		 Ajuste esperado para el paciente Posible ajuste para el paciente															

NOTA:

- Debe usarse la oclusión del 50 % de las narinas para elegir el tamaño de la cánula.
- El peso del paciente debe usarse solamente como guía.



Para ver el vídeo de Optiflow™ Junior 2 en servicio, escanee este código QR.

* IMPORTANTE: Consulte siempre las instrucciones del usuario facilitadas con el producto para ver las instrucciones de configuración completas, las advertencias, precauciones y contraindicaciones.