

## GUIA DE APLICAÇÃO DA CÂNULA NASAL

A seguir apresentamos uma sugestão do procedimento para aplicação da Cânula Nasal Optiflow™ Junior 2 (OJR410, OJR412, OJR414, OJR416, OJR418).

### APLICAÇÃO\*

#### 1 Selecionar o tamanho da cânula

Selecione uma cânula com tamanho apropriado ; a oclusão recomendada das narinas deve ser de aproximadamente 50%. O gráfico de dimensionamento na página seguinte só deve ser utilizado como orientação inicial.

#### 2 Prepare a pele

Prepare a pele do paciente de acordo com o protocolo hospitalar.

#### 3 Ligue o sistema à uma fonte de gás

Ligue a cânula à fonte de gás.  
SUGESTÃO: Coloque a mão próximo das prongs nasais para garantir que existe fluxo de gás saindo das prongs.

#### 4 Remova as primeiras fitas do F&P Wigglepad™ 2

Remova as primeiras fitas de proteção dos F&P Wigglepads™ 2 e evite tocar no adesivo.


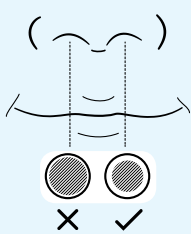




#### 5 Insira a cânula

Insira a cânula nas narinas. Certifique-se de que a ponte da cânula esteja posicionada próximo ao nariz sem tocar no septo. NÃO estique a cânula durante a aplicação. Fixe os F&P Wigglepads™ 2 nas bochechas do paciente .

#### 6 Fixe a cânula

Remova a segunda fita de proteção e fixe os F&P Wigglepads™ 2 nas bochechas do paciente.

### 1 SELECIONE O TAMANHO DA CÂNULA

OPÇÕES DE TAMANHOS		GARANTA UM ESPAÇO AO REDOR DAS PRONGS*
XS	 OJR410	
S	 OJR412	
M	 OJR414	
L	 OJR416	
XL	 OJR418	



\* IMPORTANTE: Consulte sempre as instruções de uso fornecidas com o produto para obter as instruções completas sobre instalação, advertências, precauções e contraindicações.

### REMOVER A CÂNULA

#### 1 Segure o F&P Wigglepads™ com a ponta do dedo

Coloque a ponta do dedo na extremidade exterior dos F&P Wigglepads™ 2 e, com cuidado, descole a cânula dos Wigglepads 2.



### REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS F&P WIGGLEPADS™ 2

#### 1 Retire a extremidade

Levante a extremidade dos F&P Wigglepads™ 2. Utilize um pano úmido para limpar a pele do paciente a parte inferior dos Wigglepads 2 enquanto os remove, com cuidado, da pele do paciente.



#### 2 Fixar

Para fixar os F&P Wigglepads™ 2 de substituição à cânula, remova as primeiras fitas de proteção e cole os Wigglepads 2 na bochecha do paciente.



#### 3 Remover

Remova a segunda fita de proteção e fixe na bochecha do paciente.

### INFORMAÇÕES SOBRE TAMANHOS

		GUIA DE PESOS (KG)								ITENS SOBRESSALENTES							
		500g	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4								
	<b>OJR410 XS</b>									F&P Wigglepads™ 2 WJR110							
	<b>OJR412 S</b>																
		GUIA DE PESOS (KG)															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20	25	30	ITENS SOBRESSALENTES	
	<b>OJR414 M</b>															F&P Wigglepads™ 2 WJR112	
	<b>OJR416 L</b>																
	<b>OJR418 XL</b>																

■ Prevê-se que seja adequado para o paciente    ■ Pode ser adequado para o paciente

#### NOTA:

1. A oclusão recomendada das narinas de 50%, deve ser utilizada para o dimensionamento correto da cânula.
2. O guia de peso do paciente só deverá servir como orientação inicial.



Para visualizar o vídeo do Optiflow™ Junior 2, leia este código QR

\* IMPORTANTE: Consulte sempre as instruções de uso fornecidas com o produto para obter as instruções completas sobre instalação, advertências, precauções e contraindicações.