



ANPASSUNGSANWEISUNG

ANPASSUNG*

1 Kanülengröße auswählen

Die passende Kanülengröße auswählen; um beide Prongs sollte ein deutlicher Abstand zu sehen sein. Die Maßtabelle auf der folgenden Seite sollte nur zur Orientierung verwendet werden.

2 Haut präparieren

Die Haut des Patienten gemäß den Klinikrichtlinien vorbereiten.

3 An Gasversorgung anschließen

Das System an die Gasversorgung anschließen und sicherstellen, dass Gas durch die Prongs austritt.

4 Die erste F&P Wigglepads™ 2-Klebefolie entfernen

Die erste Klebefolie von den F&P Wigglepads 2 entfernen und dabei eine Berührung der Klebefläche vermeiden.


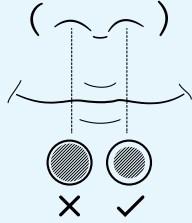
5 Kanüle einsetzen

Die Kanüle in die Nasenlöcher einsetzen. Sicherstellen, dass die Kanülenbrücke direkt unter der Nase liegt, das Septum dabei jedoch nicht berührt wird. Die Kanüle während des Anlegens NICHT auseinanderziehen. Die F&P Wigglepads 2 auf die Wangen des Patienten kleben.

6 Kanüle sichern

Die zweite Klebefolie abziehen und die F&P Wigglepads 2 auf die Wangen kleben.

1 KANÜLENGRÖSSE AUSWÄHLEN

GRÖSSENBEREICH	ABSTAND UM DIE PRONGS EINHALTEN*
XXL OJR520 	



* WICHTIG: Stets die Gebrauchsanweisung beachten, die mit dem Produkt geliefert wird. Dort finden Sie die vollständigen Benutzerhinweise zum Setup, Warn- und Vorsichtshinweise sowie Kontraindikationen.

ENTFERNEN DER KANÜLE

1 Fingerspitze auflegen

Die Fingerspitze auf den Rand der F&P Wigglepads 2 auflegen und die Kanüle vorsichtig von den Wigglepads 2 abziehen. Vom äußeren Rand in Richtung Nase abziehen.



ENTFERNEN UND WECHSEL DER F&P WIGGLEPADS 2

1 Die Kante hochziehen

Den Rand der F&P Wigglepads 2 hochziehen. Mit einem angefeuchteten Tuch die Haut des Patienten und die Unterseite der Wigglepads 2 abtupfen und die Pads dabei vorsichtig vom Gesicht des Patienten abziehen.



2 Aufkleben

Die F&P Wigglepads 2 Ersatzklebestreifen an der Kanüle befestigen, die erste Klebefolie entfernen und die Wigglepads 2 auf die Wangen des Patienten kleben.



3 Entfernen

Die zweite Klebefolie abziehen und die Pads auf die Wangen des Patienten kleben.

HINWEISE ZU DEN GRÖSSEN

- Die Prongs dürfen die Nasenlöcher nicht vollständig verschließen. Um beide Prongs sollte ein deutlicher Abstand zu sehen sein.
- Das angegebene Gewicht des Patienten versteht sich lediglich als Richtwert.

	GEWICHTSTABELLE (KG)					ERSATZTEILE
	0	8	12,5	20	30	
OJR520 XXL 