



XXL

## GUÍA PARA COLOCAR LAS MÁSCARAS

### AJUSTE\*


#### 1 Selección del tamaño de la cánula

Seleccione el tamaño de cánula apropiado; debe quedar un espacio libre visible alrededor de cada cánula nasal. Como guía se debe utilizar únicamente la tabla de tamaños de la página siguiente.

#### 1 SELECCIÓN DEL TAMAÑO DE LA CÁNULA

GAMA DE TAMAÑOS

GARANTICE EL ESPACIO ALREDEDOR DE LAS CÁNULAS NASALES\*

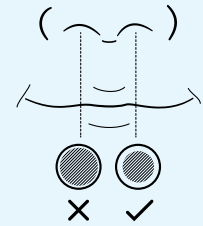

#### 2 Preparación de la piel

Prepare la piel del paciente de acuerdo con el protocolo del hospital.

#### 3 Conexión a la fuente de oxígeno

Conecte el sistema a la fuente de gas y asegúrese de que haya flujo de gas a través de las cánulas nasales.

#### 4 Retirada de las primeras lengüetas de las F&P Wigglepads™ 2

Retire las primeras lengüetas de refuerzo de las F&P Wigglepads 2 sin tocar el adhesivo.



#### 5 Inserción de la cánula

Inserte la cánula en las narinas. Asegúrese de que el puente de la cánula repose cerca de la nariz sin tocar el tabique. NO estire la cánula durante su colocación. Pegue las F&P Wigglepads 2 sobre las mejillas del paciente.



#### 6 Fijación de la cánula

Retire las segundas lengüetas de refuerzo y pegue las F&P Wigglepads 2 sobre las mejillas.



\* IMPORTANTE: Consulte siempre las instrucciones de uso facilitadas con el producto para ver las instrucciones de configuración completas, las advertencias, precauciones y contraindicaciones.

## EXTRACCIÓN DE LA CÁNULA

### 1 Colocación de la punta del dedo

Coloque la punta del dedo sobre el borde exterior de las F&P Wigglepads 2 y despegue la cánula de las Wigglepads 2 con suavidad. Despegue la cánula desde la parte exterior hacia la nariz.



## RETIRADA Y SUSTITUCIÓN DE LAS F&P WIGGLEPADS 2

### 1 Levantamiento del borde

Levante el borde de las F&P Wigglepads 2. Utilice un paño húmedo para limpiar la piel del paciente y el lado inferior de las Wigglepads 2 mientras las separa de la cara del paciente.



### 2 Adhesión

Adhiera las F&P Wigglepads 2 de repuesto a la cánula, retire las primeras lengüetas de refuerzo y pegue las Wigglepads 2 sobre las mejillas del paciente.






### 3 Eliminación

Retire las segundas lengüetas de refuerzo y pegue las Wigglepads 2 sobre las mejillas del paciente.

## INFORMACIÓN SOBRE TAMAÑOS

- Las cánulas nasales no deben sellar las narinas. Debe quedar un espacio libre visible alrededor de cada cánula nasal.
- El peso del paciente debe usarse solamente como guía.

	GUÍA DE PESO (KG)						REPUESTOS
	0	8	12,5	20	30	40	
<b>OJR520 XXL</b> 							<b>F&amp;P Wigglepads™ 2</b> WJR114 
							

Optiflow, Wigglepads y Dolphin son marcas comerciales de Fisher & Paykel Healthcare Limited.

REF 619910 REV A 2020-04 © 2020 Fisher & Paykel Healthcare Ltd