




1
Sélectionner la taille appropriée. Les canules ne doivent pas créer d'étanchéité avec les narines. Un espace dégagé doit être visible autour de chaque canule.

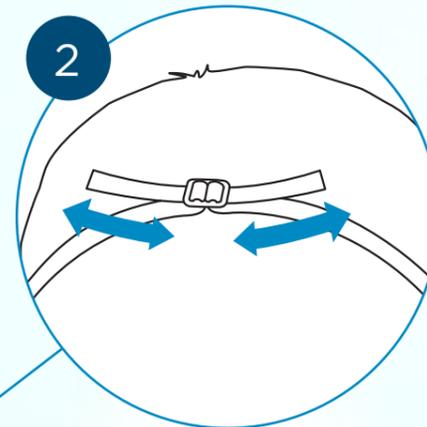


2
Ajuster correctement la sangle de tête. Éviter de trop serrer.

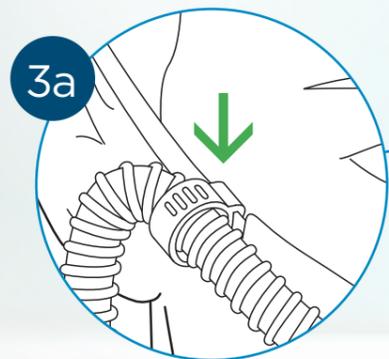


3a
S'assurer que le clip de la sangle est attaché afin d'empêcher que les canules ne sortent des narines.

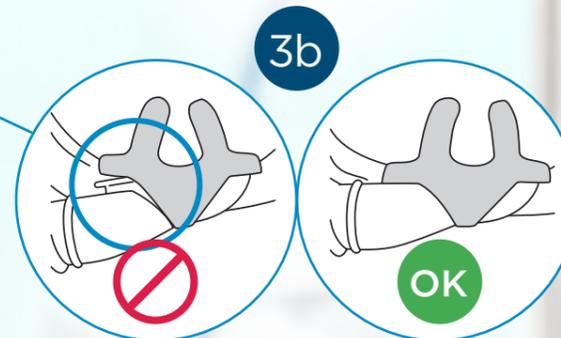

3b
La canule peut se détacher si le clip de la sangle n'est pas utilisé.

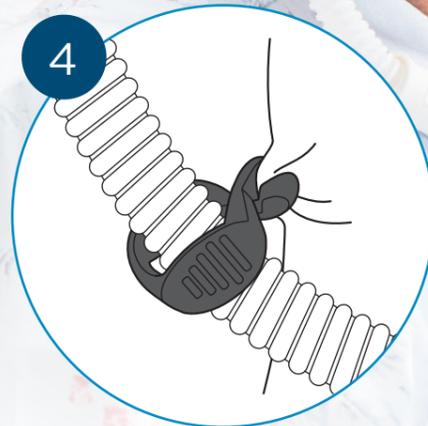

4
Fixer le clip du tube au vêtement/drap de lit pour éviter que la canule ne tombe du visage.

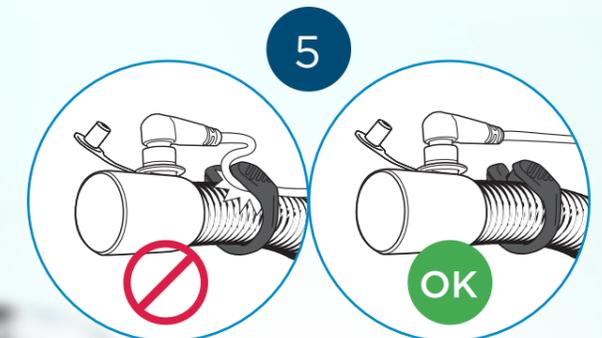

5
En cas d'utilisation d'un humidificateur chauffant MR850, fixer le clip de tubulure au circuit respiratoire et vérifier que le clip de tubulure n'écrase pas le câble de la sonde.