




選擇適當尺寸。鼻叉管不能堵住鼻孔。
鼻叉管的周圍，須能清楚地看見空隙。

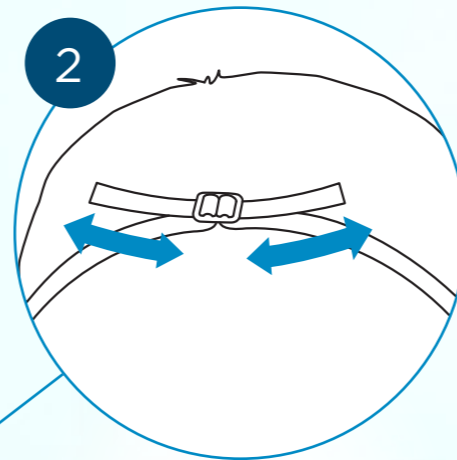


調整頭帶以合身。請勿過緊。

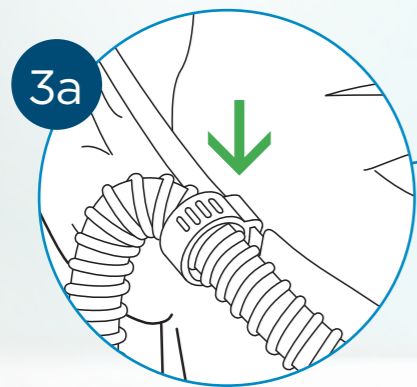


確認裝上頭帶夾，以防導管從鼻孔拉出。

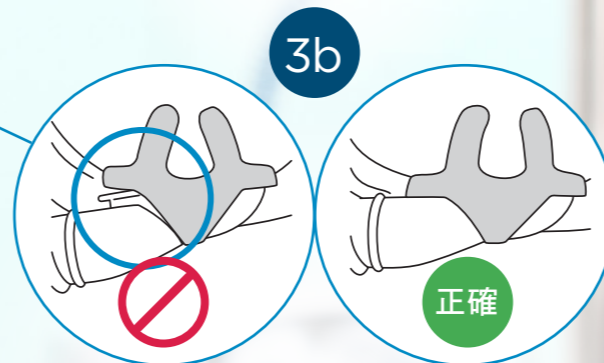

如不使用頭帶夾可能無法裝上導管。

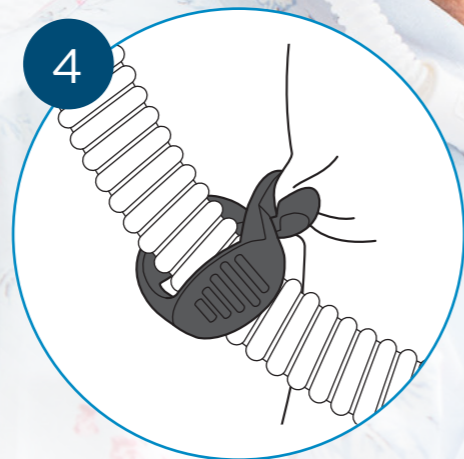

將管路管夾夾到衣服/
床單上以防止鼻導管被拉離臉部。

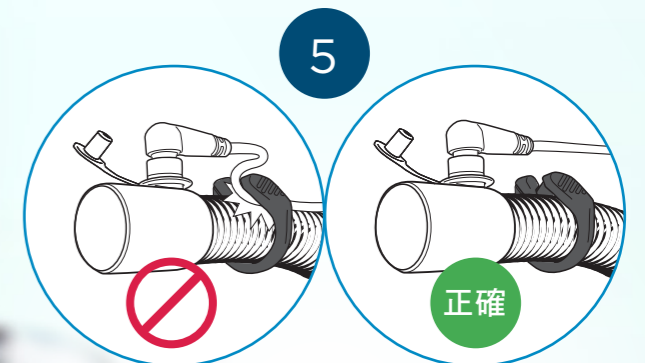

如果使用 MR850 加熱式濕化器，請將管路夾在呼
吸管路上，但要確保管夾不會壓壞探頭電線。