

Stabil. Simpel. Soft.  
Kompromissloses Design.



## Optiflow in Bewegung

Egal ob Ihr Patient ambulant versorgt wird oder regelmäßig umgelagert werden muss, Optiflow 3S bewegt sich mit ihm.



Durch die einzigartige Kombination von Anpassungsmöglichkeiten bietet Ihnen Optiflow 3S die Flexibilität, die Sie benötigen, um das Interface an den Patienten anzupassen und ihn sicher und effektiv umzulagern.



### F&P Universal-Anschluss

Kompatibel mit einer Reihe von F&P Healthcare-Schlauchsystemen, die das Respiratory Care Continuum™ unterstützen.



### Schnellverschlüsse

Schnellere Entfernung und leichtere Anpassung, wenn die Kanüle um den Kopf gelegt werden soll.



### Trennbare Kopfband

Für zusätzliche Stabilität können die Bänder um den Oberkopf Ihres Patienten gelegt und bei Bedarf neu positioniert werden.



### Variabler Anschluss

Wenn Sie Ihren Patienten vom Bett zum Stuhl bringen oder umpositionieren, um Druckgeschwüren vorzubeugen, ermöglicht es Ihnen der variable Anschluss, das Schlauchsystem und Ihren Patienten umzulagern – ohne sich zu verheddern.

# Merkmale



## Einrast-Schlauchclip

Nimmt das Gewicht des Schlauchsystems auf, um die Prongs in ihrer Position zu halten und sorgt so dafür, dass **das Interface weniger verrutscht**.

Hält den Schlauch an der Seite des Patientengesichts sanft fest.



## F&P Universal-Anschluss

Unterstützt das Respiratory Care Continuum durch Kompatibilität mit einer Reihe von F&P-Schlauchsystemen.

Farbcodiert, um eine schnelle Größenidentifizierung zu ermöglichen und so die Anpassung zu vereinfachen.



## Schnellverschlüsse

Leichtere **Anpassung**. Schnelle Entfernung des Interface.



## VELCRO® Klettverschlüsse

Hält die Bänder vom Gesicht fern.

## Interface mit konturierten Armen

Für hohen Komfort sind die Kanülenarme von weichem Material umgeben und der natürlichen Gesichtsform nachgebildet.

Strukturierte und dennoch flexible Arme bieten einen **sicheren** Sitz, ohne eine Überstraffung zu begünstigen.



## Trennbares Kopfband

**Weiches**, atmungsaktives Material leitet Feuchtigkeit vom Kopf weg.

Ohne Verheddern, sofort einsetzbar und für zusätzliche Stabilität trennbar.


Kopfband konzipiert für **Stabilität** und **Flexibilität**.



## Evaqua™ atmungsaktiver Schlauch

Das Erreichen einer idealen Feuchtigkeit führt immer zu einer gewissen Kondensation. Wenn dies nicht beachtet wird, kann es zu einer Okklusion des Schlauches durch Kondensat kommen, welches schließlich vom Patienten eingeatmet werden könnte.

Evaqua ist ein strapazierfähiges, **atmungsaktives** Material, das ein effektives Kondensatmanagement ermöglicht, indem Wasserdampf über die Schlauchwände diffundiert und so **die Zeit bis zur Okklusion verzögert wird**.

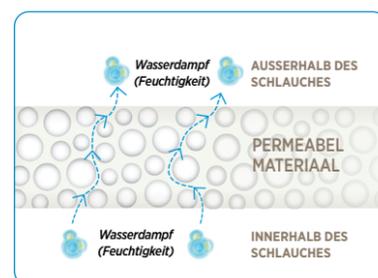

## Variabler Anschluss

Erleichtert die **Patientenumpositionierung**.

Der Schlauch kann bei Patienten, die auf der Seite oder auf dem Bauch liegen, mühelos unter dem Gesicht umgesteckt werden.

Bietet Klinikern **Flexibilität** beim Einrichten, da die Therapie von beiden Seiten des Patienten aus erfolgen kann.



## Philtrum-Kissen

Reduziert den Druck auf Nase und Oberlippe (Philtrum), während das strukturierte Druckmodul ein Kollabieren der Prongs verhindert.



## Recyclbare Verpackung

Die komplett aus PET hergestellte Verpackung kann ohne Entfernung des Etiketts recycelt werden.

## F&P Optiflow 3S

Stabil. Simpel. Soft.  
Kompromissloses Design.

Bei der Entwicklung unserer neuesten Nasal-Interfaces haben wir die wichtigsten Anforderungen unserer Anwender mit einfließen lassen:

**Stabilität, Einfachheit** und **Weichheit**.

Unsere Ingenieure haben alles daran gesetzt, ein Interface zu entwickeln, das diese Anforderungen bestmöglich erfüllt.

Das Ergebnis? Optiflow 3S, benannt nach der kompromisslosen Designphilosophie unserer Ingenieure.



57%  
mehr Stabilität\*

### Stabil

Der sichere Sitz gewährleistet eine konsistente Therapie. Optiflow 3S:

- bietet 57 % mehr Stabilität\*, sodass **das Interface weniger verrutscht**
- muss dank der verbesserten Stabilität **weniger fest angezogen werden** und reduziert so den Druck auf das Gesicht
- ermöglicht es dem Patienten, **zu essen, zu trinken und zu sprechen**, ohne einen Unterbrechung der Therapie und verbessert so die Patient compliance.



Flexibilität  
bei der  
Einrichtung

### Simpel

Ein anwenderorientiertes Design, das eine effiziente Anpassung ermöglicht und sich gleichzeitig an die Bedürfnisse des Patienten anpassen lässt.

Optiflow 3S:

- bietet **Flexibilität** bei der Anpassung durch eine Reihe von Anpassungsmöglichkeiten und den variablen Schlauchanschluss
- vereinfacht die **Anpassung** durch intuitive Designmerkmale
- ist mit verschiedenen F&P-Geräten und -Schlauchsystemen kompatibel, **was die Patientenbehandlung optimiert**.



Weniger  
Druck auf das  
Gesicht

### Soft

Mit Blick auf das empfindliche Gewebe um Nase und Oberlippe konzipiert – für kompromisslosen Patientenkomfort.

Optiflow 3S:

- ist stabil gestaltet und **reduziert so den Druck** auf Gesicht und Kopf
- bietet eine größere Oberfläche, wodurch der Druck besser verteilt wird
- verfügt über ein **Philtrum-Kissen**, das eine weiche Kontaktfläche für Nase und Oberlippe bietet, ohne dass die Prongs kollabieren,
- sowie hautfreundliche **weiche Kopfband- und Rahmenmaterialien**.

\* Im Vergleich zu anderen F&P-Kanülen, gemäß internen Tests von Fisher and Paykel Healthcare.

## Erhältlich in drei Größen



OPT1042 (klein)



OPT1044 (mittel)



OPT1046 (groß)

### Produktspezifikationen

Menge pro Packung	20
Nutzung	Zum Gebrauch an einem einzigen Patienten; maximal 14 Tage
Nicht enthaltene Materialien	Nicht mit Naturkautschuklatex oder Phthalaten hergestellt (DEHP, DBP, BBP)
Kompatible Geräte	Airvo 2 (PT101xx) MR850 F&P 950*
Kompatible Schlauchsysteme	AirSpiral™ (900PT56x) RT-Serie Kit mit beheiztem Inspirationsschlauch und Kammer (z. B. RT332) F&P 950* Beheiztes Schlauchsystem-Kit für Erwachsene (z. B. 950A40)
Herstellungsverfahren	Unsteriles, nichtinvasives Produkt, hergestellt in einer kontrollierten Arbeitsumgebung
Entsorgung	Das Produkt gemäß dem Krankenhausprotokoll entsorgen. Verpackung und Etikett können zusammen entsorgt werden (beide aus recyclingfähigem PET).
Herkunftsland	Neuseeland
Benannte Stelle	TÜV SÜD Product Service GmbH CE0123



Nutzen Sie diesen QR-Code, um die F&P Optiflow 3S-Webseite zu besuchen, auf der Sie unseren Anpassungsleitfaden herunterladen, unser Anpassungsvideo ansehen oder eine Produkthanfrage stellen können.

[www.fphcare.com/optiflow3S](http://www.fphcare.com/optiflow3S)

617264 REV B © 2020 Fisher & Paykel Healthcare Limited

\* Das F&P 950-System ist möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich. Das F&P 950-System ist derzeit nicht zum Verkauf in den USA zugelassen.

Dieses Produkt ist unter Umständen in Ihrem Land nicht verfügbar. Wenden Sie sich an Ihre Fisher & Paykel Healthcare-Vertretung. Weitere Informationen zu Optiflow 3S, einschließlich Warn- und Vorsichtshinweisen, entnehmen Sie bitte den Gebrauchsanweisungen.