



Guia Para Utilização de Bateria Externa

Este guia fornece as informações e especificações que você deve procurar, se quiser utilizar o F&P SleepStyle™ com uma fonte de alimentação CA portátil ou uma bateria externa e um inversor.

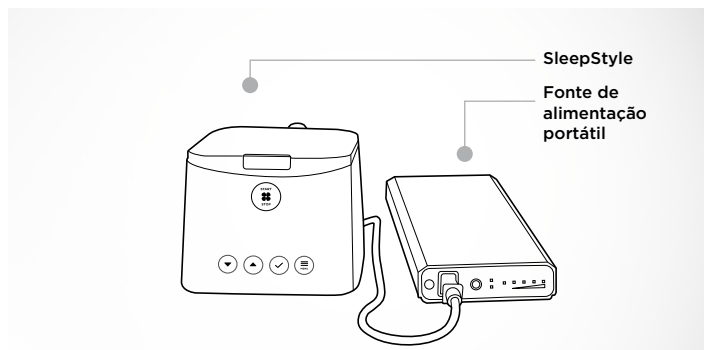

SleepStyle + fonte de alimentação CA portátil

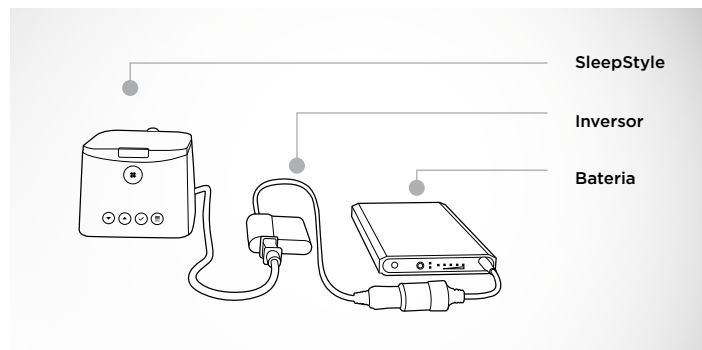

SleepStyle + Inversor + Bateria

Essas ilustrações não representam os equipamentos reais. Entre em contato com os fornecedores locais de equipamentos eletrônicos, automotivos ou de camping com as especificações descritas neste guia, para obter informações sobre as fontes de alimentação CA portáteis, baterias e inversores disponíveis.

1. Escolha uma fonte de alimentação CA portátil ou uma bateria externa

Fatores a serem considerados:

- Revisões on-line e comparações com diferentes marcas
- Capacidade da bateria e autonomia que você terá.
- As configurações de umidificação acima de 0 durante a terapia consomem mais energia e requererem uma bateria ou inversor com maior capacidade.

A seguir está a capacidade indicativa da bateria, em Watts/hora (Wh), necessária para fornecer alimentação ao SleepStyle:

Pressão média: 10 cmH₂O, umidade: 0

Autonomia	4 horas	6 horas	8 horas	12 horas
Capacidade mínima de bateria necessária	56 Wh	84 Wh	112 Wh	168 Wh

Pressão média: 20 cmH₂O, umidade: 0

Autonomia	4 horas	6 horas	8 horas	12 horas
Capacidade mínima de bateria necessária	96 Wh	144 Wh	192 Wh	288 Wh

2. Escolha um inversor

Se você escolheu utilizar uma bateria externa, também precisará comprar um inversor.

Fatores a serem considerados:

- Revisões on-line e comparações com diferentes marcas
- Ruído do inversor
- Algumas opções de bateria externa já vêm com um inversor incluído.

A seguir estão as especificações do inversor que você deve procurar:

- Tensão elétrica nominal: 150 W ou maior
- Corrente elétrica nominal:
 - 0,7 A ou maior quando a rede elétrica é de 110 V
 - 1,4 A ou maior quando a rede elétrica é de 230 V
- O inversor pode ser de onda senoidal modificada ou onda senoidal pura.

3. Como Conectar seu SleepStyle

F&P SleepStyle + fonte de alimentação CA portátil

1. Conecte o cabo elétrico do SleepStyle à fonte de alimentação CA portátil e ligue-a.
2. Quando o SleepStyle estiver ligado, pressione o botão “Start” para iniciar a terapia.


F&P SleepStyle + inversor + bateria

1. Conecte o inversor à bateria.
2. Conecte o SleepStyle ao inversor e ligue a bateria.
3. Quando o SleepStyle estiver ligado, pressione o botão “Start” para iniciar a terapia.

Bateria alternativa (automotiva)

Verifique a capacidade da bateria adicional do seu veículo para confirmar quantas horas de autonomia ela oferece.

Baterias de 12V com corrente elétrica nominal em ampère-hora (Ah)

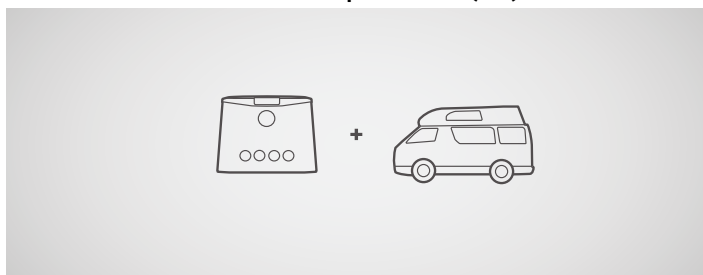


Pressão média: 10 cmH₂O, umidade: 0

Autonomia	4 horas	6 horas	8 horas	12 horas
Capacidade mínima de bateria necessária	4,7 Ah	7,0 Ah	9,4 Ah	14,0 Ah

Pressão média: 20 cmH₂O, umidade: 0

Autonomia	4 horas	6 horas	8 horas	12 horas
Capacidade mínima de bateria necessária	4,7 Ah	12,0 Ah	16,0 Ah	24,0 Ah

Baterias de 24V com corrente elétrica nominal em ampère-hora (Ah)

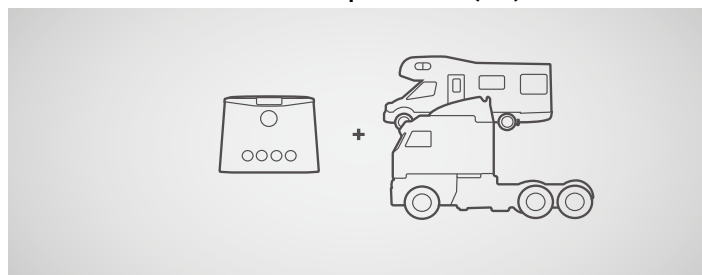

Pressão média: 10 cmH₂O, umidade: 0

Autonomia	4 horas	6 horas	8 horas	12 horas
Capacidade mínima de bateria necessária	2,3 Ah	3,5 Ah	4,7 Ah	7,0 Ah

Pressão média: 20 cmH₂O, umidade: 0

Autonomia	4 horas	6 horas	8 horas	12 horas
Capacidade mínima de bateria necessária	4,0 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah	12,0 Ah

A Fisher & Paykel Healthcare não vende ou fornece baterias ou inversores. A Fisher & Paykel Healthcare não recomenda um produto ou fabricante específico de baterias ou inversores. As baterias e os inversores estão disponíveis em lojas de eletrônicos, automotivas ou de camping.

F&P e SleepStyle podem não ser apropriados para você. Leia as advertências e instruções de utilização antes da compra. Este guia não substitui o Manual de utilização e cuidados do SleepStyle. Utilize somente de acordo com as instruções. Siga sempre as instruções de utilização.

F&P e SleepStyle são marcas comerciais da Fisher and Paykel Healthcare Limited.