



F&P Visairo

Visairo Bridge-free™ Vollgesichts-Krankenhausmaske –
REF RT075, RT076, RT077

Anpassungsanweisung für Masken



Um das passende Video anzusehen,
scannen Sie den QR-Code oder
gehen Sie zu qr.fph.co/fitvisairo




F&P, Visairo und Bridge-free sind Marken von Fisher & Paykel Healthcare Limited.
REF 630395 REV A © 2023 Fisher & Paykel Healthcare Limited 


www.fphcare.com/visairo

Fisher & Paykel
HEALTHCARE


Die Größe Ihres Patienten bestimmen

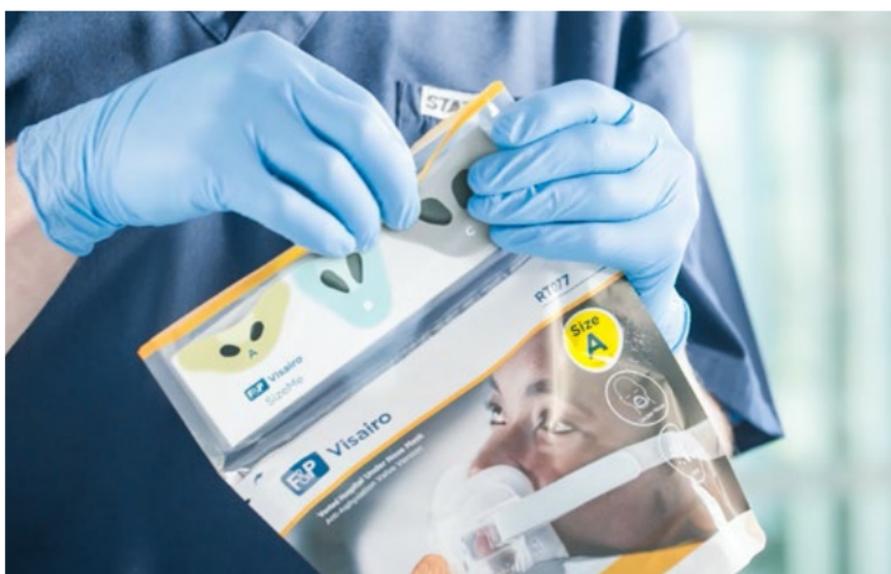

Jedem Maskenpaket liegt eine Größenschablone bei.

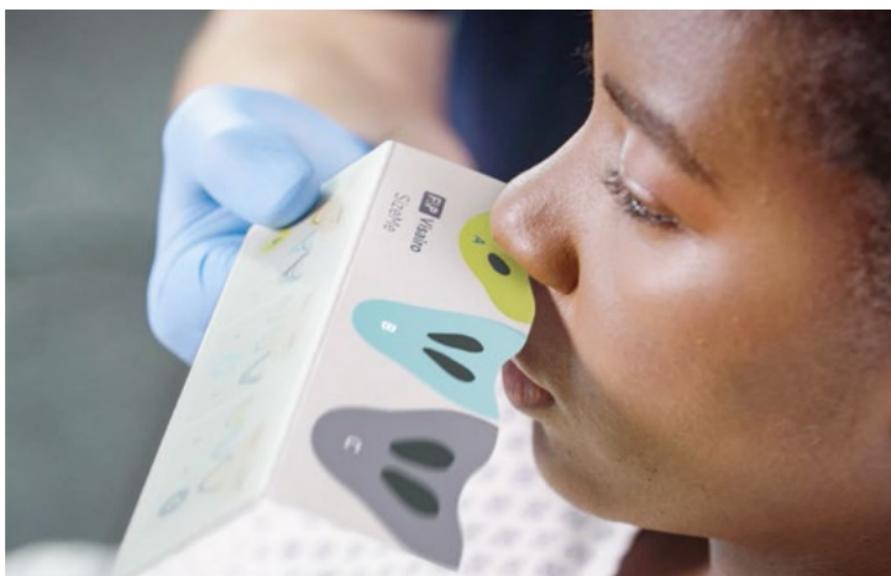

Setzen Sie die Größenschablone unter die Nase Ihres Patienten und neigen Sie sie nach oben, so dass sie flach an den Nasenlöchern liegt.

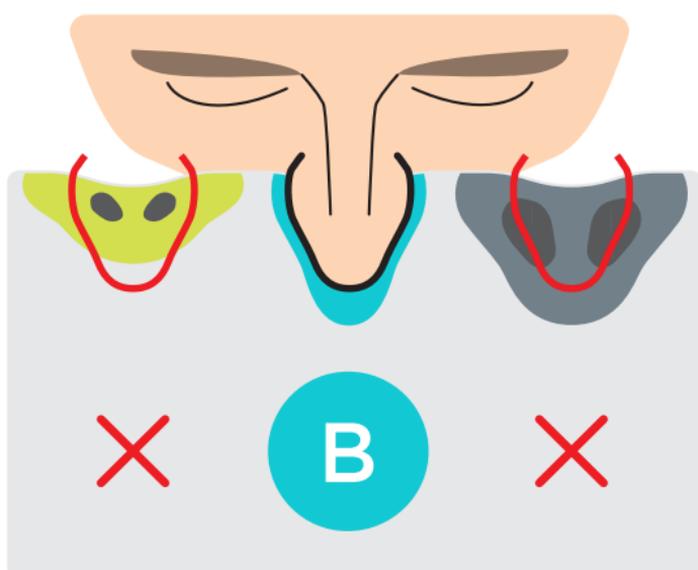

Die Nase Ihres Patienten sollte sich innerhalb des farbigen Größenprofils befinden und die schwarzen Nasenlöcher abdecken.

Auflegen der Maske



Entfernen Sie beide Maskenclips.



Bei Verwendung von NG/OG-Sonden den Schlauch nicht durch die Nasenöffnung der Maske führen.



Die Maske **unter** die Nase schieben, das Kopfband über den Kopf schieben und beide Maskenclips anschließen.



Die Clips an beiden Seiten der Maske anschließen.

Diese Anleitung ist kein Ersatz für die klinische Beurteilung durch entsprechend qualifiziertes medizinisches Personal und ersetzt nicht die Gebrauchsanweisungen. Eine vollständige Beschreibung der Produkteinrichtung, Warnhinweise, Vorsichtshinweise, Kontraindikationen, Systeminformationen und Symbolerklärungen sind den Gebrauchsanweisungen für Atemgasbefeuchter, Zubehör und Patienten-Interfaces von Fisher & Paykel Healthcare zu entnehmen.

Anpassen der Maskenbänder



Das Oberkopfband **festziehen**, um die Kopfbänder vom **Ohr** weg zu bewegen.

Das Oberkopfband **lockern**, um die Kopfbänder von den **Augen** weg zu bewegen.




Den oberen Riemen anpassen, um die **Abdichtung unter der Nase** zu sichern.



Den unteren Riemen anpassen, um die **Kinnabdichtung** zu sichern.

Diese Anleitung ist kein Ersatz für die klinische Beurteilung durch entsprechend qualifiziertes medizinisches Personal und ersetzt nicht die Gebrauchsanweisungen. Eine vollständige Beschreibung der Produkteinrichtung, Warnhinweise, Vorsichtshinweise, Kontraindikationen, Systeminformationen und Symbolerklärungen sind den Gebrauchsanweisungen für Atemgasbefeuchter, Zubehör und Patienten-Interfaces von Fisher & Paykel Healthcare zu entnehmen.

Sicherstellen der richtigen Passform

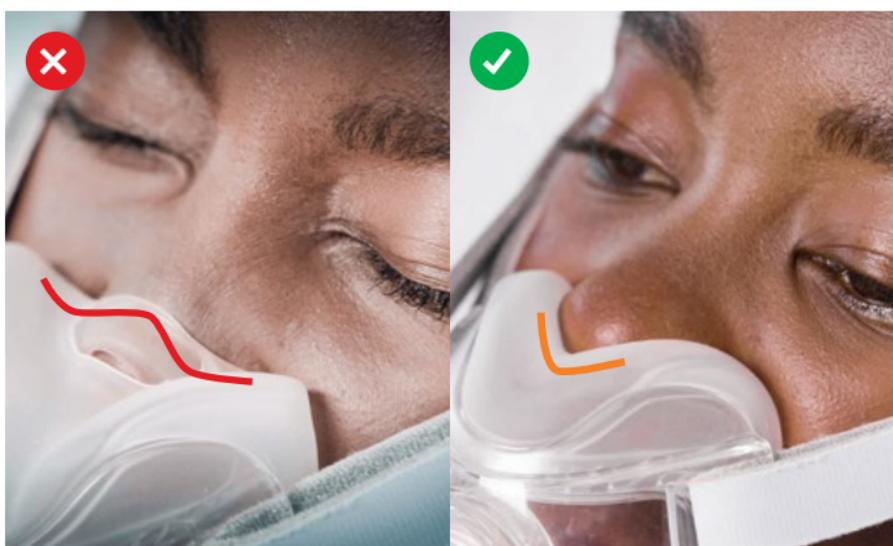

Sicherstellen, dass das flexible Maskenkissen **unter** der Nase des Patienten sitzt.



Sicherstellen, dass das Oberkopfband in der **Mitte** des Kopfes sitzt.

Einen **Abstand in Fingerbreite** zwischen Kopfband und Ohr lassen.



Die Maske nach vorn ziehen, um das Maskenkissen aufzurichten, und sicherstellen, dass die Maske nicht zu fest angezogen ist.


Ein zu festes Anziehen der Maske kann zu mehr unerwünschten Leckagen führen.

Diese Anleitung ist kein Ersatz für die klinische Beurteilung durch entsprechend qualifiziertes medizinisches Personal und ersetzt nicht die Gebrauchsanweisungen. Eine vollständige Beschreibung der Produkteinrichtung, Warnhinweise, Vorsichtshinweise, Kontraindikationen, Systeminformationen und Symbolerklärungen sind den Gebrauchsanweisungen für Atemgasbefeuchter, Zubehör und Patienten-Interfaces von Fisher & Paykel Healthcare zu entnehmen.

Abnehmen der Maske für Pausen



Lösen Sie die Clips der Maske - entfernen Sie nicht die Klettverschlüsse, denn das Beibehalten der Klettverschlüsse erleichtert das Wiederanlegen.

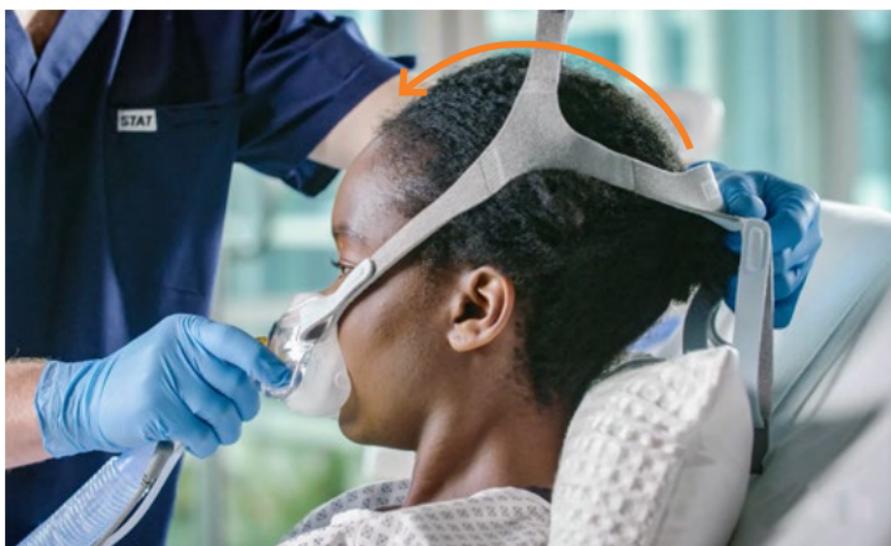

Das Kopfband über den Kopf des Patienten schieben, um die Maske abzunehmen.



Die oberen Riemen können zum einfachen Wiederaufsetzen an der Maske befestigt bleiben.

Diese Anleitung ist kein Ersatz für die klinische Beurteilung durch entsprechend qualifiziertes medizinisches Personal und ersetzt nicht die Gebrauchsanweisungen. Eine vollständige Beschreibung der Produkteinrichtung, Warnhinweise, Vorsichtshinweise, Kontraindikationen, Systeminformationen und Symbolerklärungen sind den Gebrauchsanweisungen für Atemgasbefeuchter, Zubehör und Patienten-Interfaces von Fisher & Paykel Healthcare zu entnehmen.

Die Anweisungen in dieser Anleitung ersetzen nicht die Gebrauchsanweisung, die der F&P Visairo-Maske beiliegt.

Die vollständige Produkteinrichtung, Beschreibungen, Vorsichtsmaßnahmen, Warnhinweise, Kontraindikationen und sonstige Hinweise entnehmen Sie bitte den Gebrauchsanweisungen zu diesem Produkt.

Für weitere Informationen über F&P Visairo oder andere F&P-Produkte wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter.



Für weitere Informationen scannen Sie bitte den obigen QR-Code, wenden Sie sich an Ihren örtlichen F&P-Vertreter oder besuchen Sie uns unter www.fphcare.com/visairo

Diese Anleitung ist kein Ersatz für die klinische Beurteilung durch entsprechend qualifiziertes medizinisches Personal und ersetzt nicht die Gebrauchsanweisungen. Eine vollständige Beschreibung der Produkteinrichtung, Warnhinweise, Vorsichtshinweise, Kontraindikationen, Systeminformationen und Symbolerklärungen sind den Gebrauchsanweisungen für Atemgasbefeuchter, Zubehör und Patienten-Interfaces von Fisher & Paykel Healthcare zu entnehmen.