


## Caratteristiche principali e vantaggi

### Cuscinetto RollFit XT

Regolabile per fornire un maggiore comfort sul setto nasale.

### Tecnologia VentiCool

Cuffia traspirante progettata per consentire la dissipazione del calore e dell'umidità.

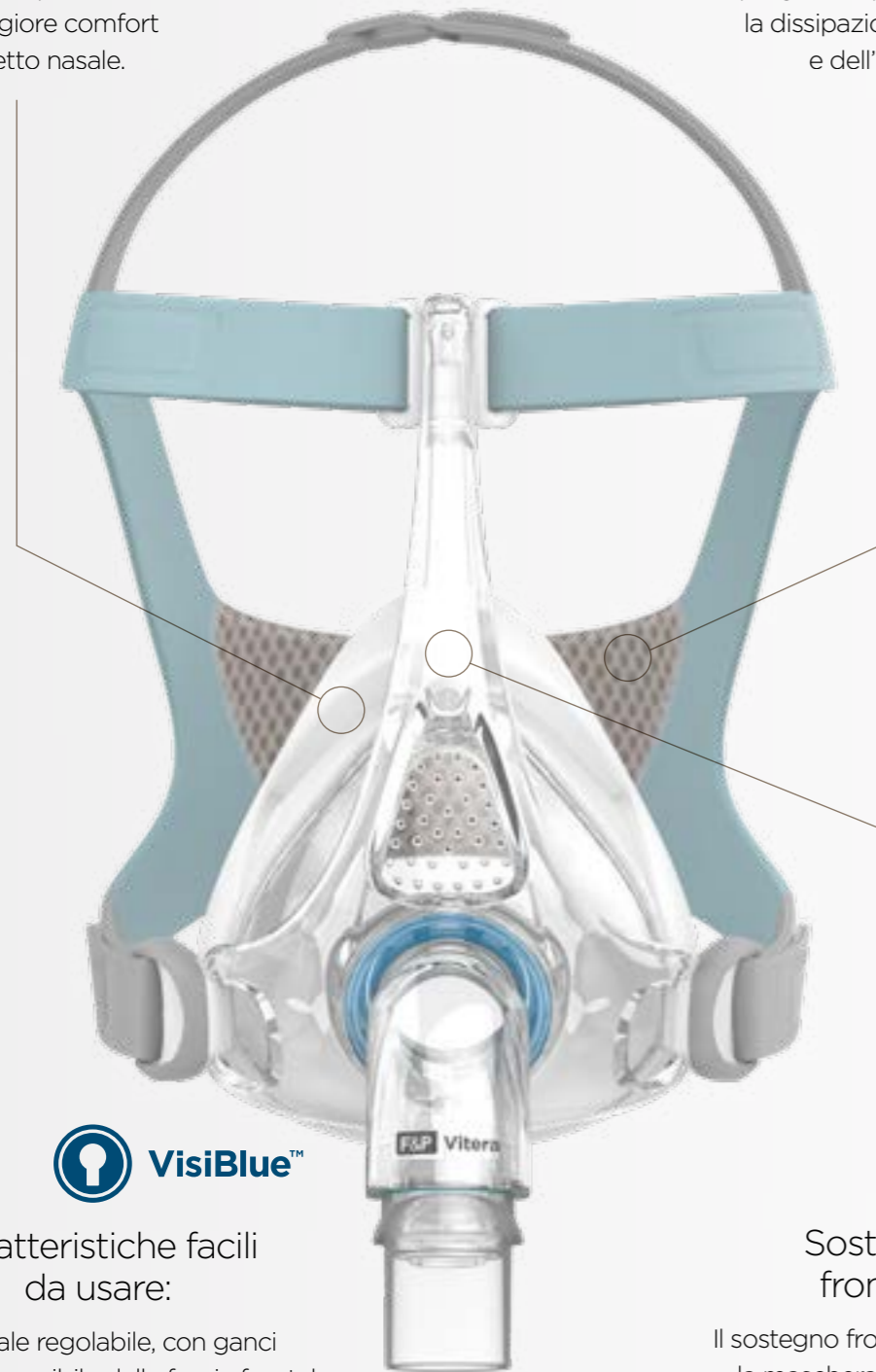

Caratteristiche facili da usare:

- Nucale regolabile, con ganci
- Gancio rimovibile della fascia frontale

Sostegno frontale

Il sostegno frontale mantiene la maschera in posizione.

## Guida per indossare la maschera



### Fase 1.

Con una mano tenere la parte frontale della maschera e con l'altra il nucale. Assicurarsi che uno dei ganci del nucale sia sganciato dalla struttura.



### Fase 2.

Mettere il cuscinetto sul viso e indossare il nucale.



### Fase 3.

Agganciare il gancio del nucale libero alla struttura.



### Fase 4.

Stringere delicatamente le cinghie del nucale, cominciando con le fasce inferiori e passando quindi ad aggiustare le fasce frontali azzurre, lasciandole lente.

### Oceania, Canada, Europa occidentale, Medio Oriente (modello U)\*

CODICE	DESCRIZIONE
VITISU	Maschera facciale Vitera, Small
VITIMU	Maschera facciale Vitera, Medium
VITILU	Maschera facciale Vitera, Large
VITISSU	Maschera Vitera, Small/Small (due cuscinetti)
VITIMMU	Maschera Vitera, Medium/Medium (due cuscinetti)
VITILLU	Maschera Vitera, Large/Large (due cuscinetti)
VITIMLU	Maschera Vitera, Medium/Large (due cuscinetti)

### Asia, Europa orientale (modello Z)\*

CODICE	DESCRIZIONE
VITISZ	Maschera facciale Vitera, Small
VITIMZ	Maschera facciale Vitera, Medium
VITILZ	Maschera facciale Vitera, Large

### Parti di ricambio

CODICE	DESCRIZIONE
400VIT131	Maschera facciale Vitera senza fasce, Small*
400VIT132	Maschera facciale Vitera senza fasce, Medium*
400VIT133	Maschera facciale Vitera senza fasce, Large*
400VIT111	Cuscinetto Vitera, Small
400VIT112	Cuscinetto Vitera, Medium
400VIT113	Cuscinetto Vitera, Large

CODICE	DESCRIZIONE
400VIT121	Nucale Vitera, Small
400VIT122	Nucale Vitera, Medium/Large
400FPH241	Raccordo F&P
400VIT151*	Ganci delle fasce nicali e frontali Vitera
400VIT171	Connettore a gomito Vitera

\*Non disponibile in tutti i paesi.

1. Silva, R. S. et al. An orientation session improves objective sleep quality and mask acceptance during positive airway pressure titration. *Sleep Breath.* (2008). doi:10.1007/s11325-007-0138-6. 2. Kryger, M., Roth, T. & Dement, W. Principles and Practice of Sleep Medicine. (Elsevier, 2010). 3. 37 pazienti su 41 hanno valutato la maschera come ugualmente comoda o più comoda della loro maschera attuale. Studio di convalida interno condotto su 41 partecipanti negli Stati Uniti d'America nel 2017. 4. 38 pazienti su 41 hanno valutato la maschera come ugualmente stabile o più stabile della loro maschera attuale. Studio di convalida interno condotto su 41 partecipanti negli Stati Uniti d'America nel 2017. 5. 33 pazienti su 41 hanno valutato la perdita come uguale o inferiore rispetto alla loro maschera attuale. Studio di convalida interno condotto su 41 partecipanti negli Stati Uniti d'America nel 2017. 6. Prove interne dimostrano che RollFit™ XT offre il 93% di movimento in più rispetto alla generazione precedente di RollFit™. 7. 36 pazienti su 41 hanno segnalato di poter dormire nella loro posizione preferita per tutto o per la maggior parte del tempo. Studio di convalida interno condotto su 41 partecipanti negli Stati Uniti d'America nel 2017. 8. 39 pazienti su 41 hanno valutato il comfort della cuffia come uguale o maggiore rispetto alla loro maschera attuale. Studio di convalida interno condotto su 41 partecipanti negli Stati Uniti d'America nel 2017. 9. Studio interno di F&P Vitera per l'analisi della traspirabilità del tessuto con tecnologia VentiCool rispetto ai materiali delle cuffie F&P Simplus™ e F&P FlexiFit™.

Vitera, RollFit, VentiCool, Simplus, FlexiFit e VisiBlue sono marchi commerciali di Fisher & Paykel Healthcare Limited.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito [www.fphcare.com](http://www.fphcare.com)

**Fisher & Paykel**  
HEALTHCARE

**F&P Vitera**

## Maschera facciale



[www.fphcare.com](http://www.fphcare.com)

**Fisher & Paykel**  
HEALTHCARE

## Prestazioni e comfort

Il comfort è unico. Il comfort è personale. Il comfort è una componente chiave per una terapia di successo.<sup>12</sup> Per questo riteniamo che il comfort sia importante durante l'intera notte di sonno, non solo durante la consultazione iniziale.

Le tecnologie F&P Vitera™ si combinano per fornire stabilità, traspirabilità e comfort durante l'intera notte.



## Libertà di movimento

RollFit™ XT, con il 93% di movimento in più rispetto alla generazione precedente di RollFit, in combinazione con la barra di stabilità, aiuta a mantenere il cuscinetto in posizione.<sup>6</sup> Il cuscinetto in silicone morbido rotola avanti e indietro. Il cuscinetto piccolo di Vitera è ora ancora più piccolo e il cuscinetto grande è ancora più grande rispetto alla nostra maschera facciale di generazione precedente.



## Comoda cuffia con tecnologia traspirante VentiCool™

La cuffia Vitera è realizzata con VentiCool, un tessuto traspirante brevettato ispirato all'abbigliamento sportivo che consente la dissipazione di una quantità maggiore di aria e umidità rispetto al materiale usato nella nostra gamma principale di maschere facciali.\*



## Un sistema sicuro e stabile.

Il 93% dei pazienti partecipanti allo studio ha valutato la maschera come stabile e ha segnalato che la maschera rimaneva in posizione durante l'uso. Inoltre, l'80% di questi pazienti ha riscontrato una perdita uguale o inferiore rispetto alla maschera abituale.<sup>4,5</sup>



\* Prove interne dimostrano che la cuffia con tecnologia VentiCool consente un flusso d'aria di 21 volte maggiore e almeno il 35% in più di scambio di umidità rispetto alla cuffia usata nelle nostre maschere facciali principali.<sup>9</sup>