










ANPASSUNGSANWEISUNG

PRODUKT	 OJR410	 OJR412	 OJR414	 OJR416	 OJR418	 OJR520
GRÖSSE DER NASENKANÜLE	XS	S	M	L	XL	XXL
F&P WigglewING™	 WJR210		 WJR212		 WJR214	

Nachfolgend ist ein empfohlenes Verfahren zum Anlegen des F&P WigglewING beschrieben:

Beachten Sie zur korrekten Positionierung des F&P WigglewING die Anweisungen zur Platzierung des F&P Wigglepads™ 2 in der Gebrauchsanleitung der F&P Optiflow™ Junior 2 und F&P Optiflow Junior 2+ Nasenkanüle.

IN ZWEI STÜCKE REISSEN

1 Haut präparieren

Haut gemäß den Klinikrichtlinien vorbereiten.

Nasenloch wählen, in das die nasogastrale Sonde eingeführt werden soll. Den F&P WigglewING über der Wange des Patienten auf derselben Seite wie dieses Nasenloch halten.

Richten Sie die weißen Tabs (mit 2 gekennzeichnet) zu sich selbst hin und die Klettfläche von Ihnen weg. Platzieren Sie den geraderen Rand zur Nase des Patienten hin.

- 2 Das gesamte obere Drittel des F&P WigglewING (distal zum Kinn des Patienten) **ABREISSEN**, indem Sie es in der Mitte festhalten und den oberen Teil abreißen. Damit verbleiben Ihnen die unteren 2/3 des F&P WigglewING.



AUF DAS GESICHT KLEBEN

3 Blaus Tab

Das blaue Tab (mit 1 gekennzeichnet) abziehen.

Den F&P WigglewING auf die Wange des Patienten **KLEBEN**.


4 Weißes Tab

Die weißen Tabs (mit 2 und F&P WigglewING gekennzeichnet) abziehen.

Die NG-Sonde gemäß Klinikrichtlinien einführen.

Die NG-Sonde entlang der Perforationen platzieren.



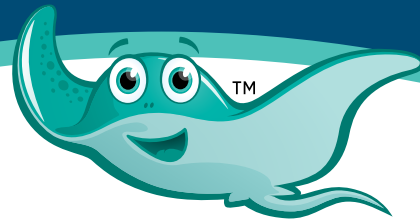

ANPASSUNGSANWEISUNG

UMFALTEN, UM DIE NG-SONDE ZU FIXIEREN

5

Umfalten

Den F&P WigglewING umfalten, um die NG-Sonde zu fixieren.

Wenden Sie den in Schritt 2 entfernten Abschnitt wie ein Wigglepadd auf der gegenüberliegenden Wange an. Entfernen Sie das vorhandene Wigglepadd von der Nasenkanüle.

6

Kanüle fixieren

Die Kanüle so fixieren, dass die Kanülenbrücke direkt unter der Nase liegt, das Septum dabei jedoch nicht berührt wird. Die Kanüle während des Anlegens nicht auseinanderziehen.

5



6



ENTFERNUNG DES F&P WIGGLEWING

1

Fingerspitze auflegen

Die Fingerspitze auf den äußeren Rand des F&P WigglewING auflegen und die Nasenkanüle vorsichtig abziehen. Vom äußeren Rand in Richtung Nase abziehen.

2

Rand hochziehen

Den Rand des F&P WigglewING hochziehen. Mit einem angefeuchteten Tuch die Haut des Patienten und die Unterseite des F&P WigglewING abtupfen und die Pads dabei vorsichtig vom Gesicht des Patienten abziehen.

3

Ablösen

Die NG-Sonde zwischen der Nase des Patienten und dem F&P WigglewING gut festhalten und die NG-Sonde vom F&P WigglewING ablösen, indem Sie sie entlang der Perforationen abziehen.

2



3



WICHTIG: Stets die Gebrauchsanleitung beachten, die mit dem Produkt geliefert wird. Dort finden Sie die vollständigen Benutzerhinweise zum Setup, Warnhinweise, Kontraindikationen und Erläuterungen.

www.fphcare.com