
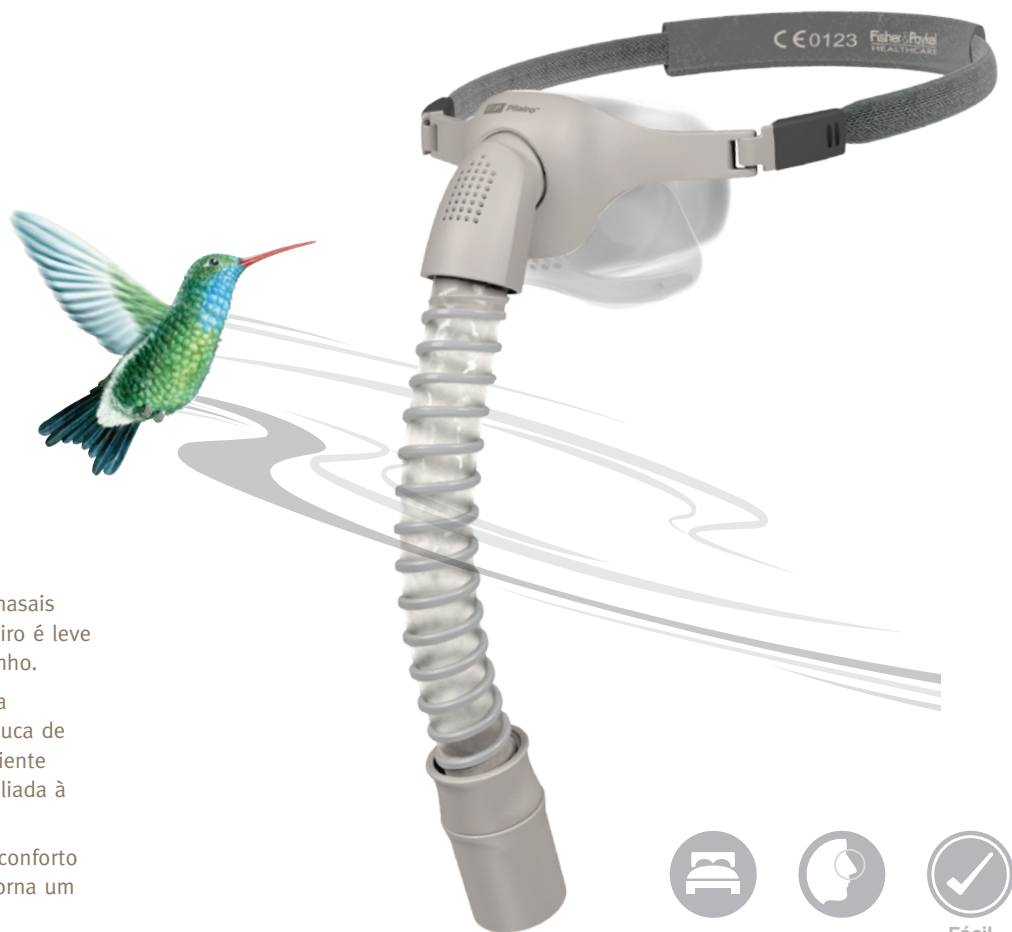


Máscara Nasal
Direta

F&P **Pilairo™**

Durma livremente com prongs de ar

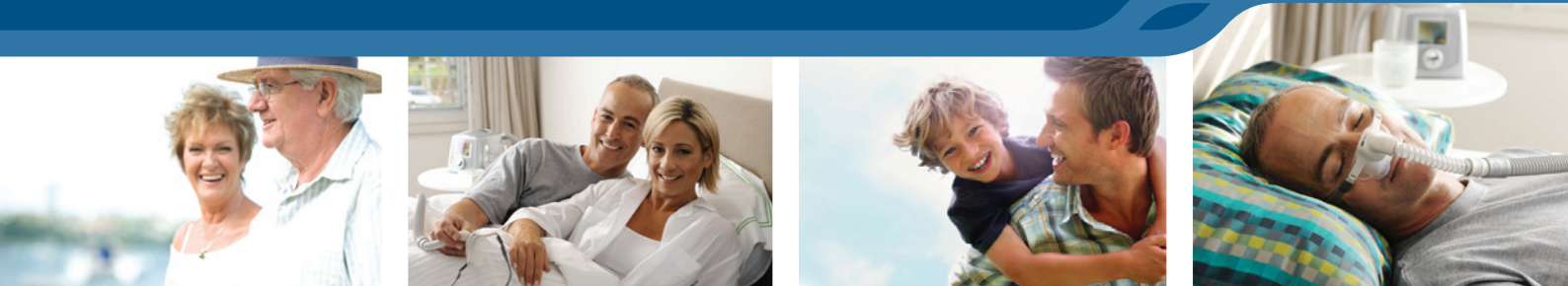

MÁSCARA NASAL DIRETA F&P PILAIRO

Com o menor peso entre as máscaras nasais diretas da F&P (52 gramas), a F&P Pilairo é leve para o paciente e grande em desempenho.

O design inteligente combina uma nova Vedação AirPillow™ autoinflável com touca de fixação mínima. Como resultado, o paciente experimenta liberdade de movimento aliada à uma estabilidade confiável.

A revolucionária Vedação AirPillow e o conforto de leveza da F&P Pilairo realmente a torna um produto líder em sua categoria.



Conforto



Vedação



Fácil
Utilização

Fisher & Paykel
HEALTHCARE

Cada detalhe da F&P Pilairo foi pesquisado, desenvolvido e projetado cuidadosamente para melhorar o SleepLife* do paciente. A F&P Pilairo representa o melhor design minimalista e altamente efetivo de máscara nasal direta e lança novos padrões de conforto, vedação e fácil utilização.



Sinta a nova Vedação AirPillow.

- O contorno super fino de silicone utilizado na Vedação AirPillow da F&P Pilairo mede 0,12 mm em sua extremidade mais fina e somente 3 mm em sua extremidade mais espessa.
- Macia, confortável e altamente eficiente, esta fina vedação foi ergonomicamente projetada para se inflar automaticamente com o fluxo do CPAP (Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas), cobrindo levemente o nariz.

Experimente um conforto completo com prongs de ar.

- A F&P Pilairo torna desnecessário ajustes adicionais e toucas de fixação complicadas.
- Seu design minimalista é estável, simples e discreto.
- Não há necessidade de tiras e ajustes confusos, ou ocorrência de lesões faciais.

Experimente uma terapia mais simples.

- Tamanho único.
- Somente três peças simples para higienizar.
- Ajuste rápido e fácil.



Conforto



Vedação



Fácil Utilização

Um pequeno pássaro nos disse para fazer uma máscara leve, pequena, rápida e inteligente.

O design da F&P Pilairo foi inspirado no voo aerodinâmico do menor pássaro do mundo: o beija-flor. O beija-flor consegue girar suas finas asas em círculo; é o único pássaro capaz de voar para frente, para trás, para cima, para baixo e para os lados, além de pairar no ar. Isso influenciou o design da vedação da máscara que se infla automaticamente ao redor das narinas de um “modo pairante” enquanto oferece total liberdade de movimento.





Esta é nossa máscara mais leve, a F&P Pilairo que pesa 52 gramas.

1. Vedação AirPillow

- A Vedação AirPillow é contornada tridimensionalmente por um fino Variable Thickness Silicone (VTS™) {Silicone de Espessura Variável}.
- Ela utiliza a pressão do CPAP para se inflar automaticamente e criar uma vedação eficaz, porém suave, no nariz e ao redor dele. A Vedação AirPillow pode ser movida e flexionada em qualquer direção sem comprometer a vedação.

2. Estabilizadores

- Os estabilizadores oferecem a estrutura de suporte para a Vedação AirPillow e auxiliam na estabilidade.

3. Touca de Fixação Stretchwise™

- Feita de uma suave fibra de elástico, sem látex, com propriedades inteligentes, a touca se adapta automaticamente ao usuário.
- Não é necessário qualquer ajuste manual.
- Tamanho único.

4. Tubo Flexível

- O circuito da máscara é leve, bastante flexível e foi projetado para minimizar a pressão sobre o rosto.
- O cotovelo giratório oferece maior flexibilidade para o posicionamento do circuito.

5. Difusor de Ar Silencioso

- Eficientemente projetado para garantir que o fluxo seja direcionado para longe do paciente e seu cônjuge propiciando um sono tranquilo.

É FÁCIL AJUSTAR A F&P PILAIRO. SIGA A SIMPLES SEQUÊNCIA ABAIXO PARA OBTER OS MELHORES RESULTADOS:



1. Abra as Abas Laterais

Utilize os dedos para abrir os prongs.



2. Posicione a Máscara

Coloque os prongs sobre o seu nariz até sentir uma vedação confortável.



3. Posicione a Touca de Fixação

Puxe a touca de fixação autoajustável de tamanho único.



4. Teste as Abas Laterais

Movimente um pouco as abas (prongs) para obter conforto.



5. Ligue o Equipamento de CPAP

A Vedação AirPillow da F&P Pilairo se inflará automaticamente e aparentemente paira no nariz e ao seu redor.

Para obter mais informações, entre em contato com seu representante local da Fisher & Paykel Healthcare

Fabricante 

Fisher & Paykel Healthcare Ltd
15 Maurice Paykel Place
East Tamaki, Auckland 2013

PO Box 14 348 Panmure
Auckland 1741
Nova Zelândia

Tel.: +64 9 574 0100
Fax: +64 9 574 0158
E-mail: info@fphcare.co.nz
Web: www.fphcare.com

Austrália

Fisher & Paykel Healthcare Pty Limited
36-40 New Street, PO Box 167
Ringwood, Melbourne
Victoria 3134, Australia

Tel.: +61 3 9879 5022
Fax: +61 3 9879 5232

Áustria

Tel.: 0800 29 31 23
Fax: 0800 29 31 22

Benelux

Tel.: +31 40 216 3555
Fax: +31 40 216 3554

China

Tel.: +86 20 3205 3486
Fax: +86 20 3205 2132

França

Tel.: +33 1 6446 5201
Fax: +33 1 6446 5221

Alemanha

Tel.: +49 7181 98599 0
Fax: +49 7181 98599 66

Índia

Tel.: +91 80 4284 4000
Fax: +91 80 4123 6044

República da Irlanda

Tel.: 1800 409 011

Itália

Tel.: +39 06 7839 2939
Fax: +39 06 7814 7709

Japão

Tel.: +81 3 3661 7205
Fax: +81 3 3661 7206

Irlanda do Norte

Tel.: 0800 132 189

Espanha

Tel.: +34 902 013 346
Fax: +34 902 013 379

Suécia

Tel.: +46 8 564 76 680
Fax: +46 8 36 63 10

Suíça

Tel.: 0800 83 47 63
Fax: 0800 83 47 54

Taiwan

Tel.: +886 2 8751 1739
Fax: +886 2 8751 5625

Turquia

Tel.: +90 312 354 34 12
Fax: +90 312 354 31 01

Reino Unido 

Fisher & Paykel Healthcare Ltd
Unit 16, Cordwallis Park
Clivemont Road, Maidenhead
Berkshire SL6 7BU, UK

Tel.: +44 1628 626 136
Fax: +44 1628 626 146

Estados Unidos/Canadá

Tel.: +1 800 446 3908
ou +1 949 453 4000
Fax: +1 949 453 4001

Conteúdo

- Máscara completa com touca de fixação montada e pronta para utilização
- Tamanho único
- Guia de fácil colocação e remoção

Código para novos pedidos
400420 F&P Pilairo